

INSTRUÇÃO DE USO

Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Broca Cirúrgica Diamantada Traumec

Material: Aço Inoxidável UNS S42000

Validade: 5 anos

Produto Estéril por Óxido de Etileno - ETO

Produto Passível de Reprocessamento, entretanto fabricante recomenda Uso Único

Verificar a revisão da Instrução de Uso disponível no site www.traumec.com.br, pois deve ser a mesma da rotulagem do produto. A Instrução de Uso de forma eletrônica está disponível para download através do site ou solicitada impressa pelo e-mail: sac@traumec.com.br ou pelo fone: +55 (19) 3522-1177 ou +55 (19) 9 9600-1557, sem custo adicional, inclusive de envio.





ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observação destes pontos poderá levar à ocorrência de complicações.

FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL













As Brocas Cirúrgicas Diamantadas Traumec são fornecidas estéreis por Óxido de Etileno - ETO, embaladas em embalagem tipo Blister selados a quente, comercializadas individualmente em embalagem final confeccionada em Papel Triplex, devidamente rotulados.




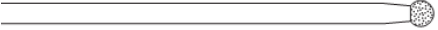



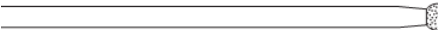



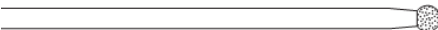
Produto passível de reprocessamento, entretanto fabricante recomenda Uso Único.






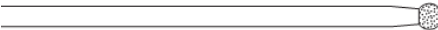




Na tabela abaixo consta os modelos comerciais que constam na família das Brocas Cirúrgicas Diamantadas Traumec:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE	ILUSTRAÇÃO
PA.02.03.1028	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,6x54		
PA.02.03.1029	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,7x54		
PA.02.03.1030	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,8x54		
PA.02.03.1031	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,0x54		
PA.02.03.1032	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,4x54		
PA.02.03.1033	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,8x54		
PA.02.03.1034	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,3x54		
PA.02.03.1035	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,7x54		
PA.02.03.1036	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,1x54		
PA.02.03.1037	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,5x54		
PA.02.03.1038	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,0x54		
PA.02.03.1039	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,5x54		
PA.02.03.1040	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,0x54		
PA.02.03.1041	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,5x54		
PA.02.03.1042	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 6,0x54		










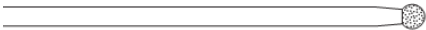















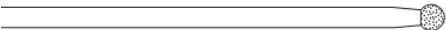



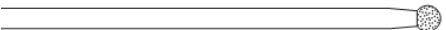
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE	ILUSTRAÇÃO
PA.02.03.1091	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,6x54		
PA.02.03.1092	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,7x54		
PA.02.03.1093	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,8x54		
PA.02.03.1094	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,0x54		
PA.02.03.1095	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,4x54		
PA.02.03.1096	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,8x54		
PA.02.03.1097	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,3x54		
PA.02.03.1098	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,7x54		
PA.02.03.1099	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,1x54		
PA.02.03.1100	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,5x54		
PA.02.03.1101	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,0x54		
PA.02.03.1102	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,5x54		
PA.02.03.1103	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,0x54		
PA.02.03.1104	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,5x54		
PA.02.03.1105	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 6,0x54		
PA.02.03.1154	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,6x54		
PA.02.03.1155	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,7x54		
PA.02.03.1156	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,8x54		
PA.02.03.1157	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,0x54		
PA.02.03.1158	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,4x54		
PA.02.03.1159	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,8x54		
PA.02.03.1160	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,3x54		
PA.02.03.1161	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,7x54		
PA.02.03.1162	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,1x54		
PA.02.03.1163	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,5x54		
PA.02.03.1164	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,0x54		
PA.02.03.1165	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,5x54		
PA.02.03.1166	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,0x54		
PA.02.03.1167	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,5x54		
PA.02.03.1168	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 6,0x54		
PA.02.03.2489	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,6x69		
PA.02.03.2490	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,7x69		
PA.02.03.2491	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,8x69		
PA.02.03.2492	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,0x69		
PA.02.03.2493	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,4x69		
PA.02.03.2494	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,8x69		
PA.02.03.2495	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,3x69		
PA.02.03.2496	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,7x69		
PA.02.03.2497	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,1x69		
PA.02.03.2498	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,5x69		
PA.02.03.2499	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,0x69		
PA.02.03.2500	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,5x69		
PA.02.03.2501	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,0x69		
PA.02.03.2502	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,5x69		
PA.02.03.2503	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 6,0x69		




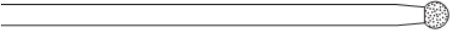



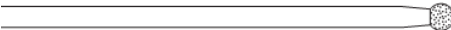
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE	ILUSTRAÇÃO
PA.02.03.2504	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,6x69		
PA.02.03.2505	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,7x69		
PA.02.03.2506	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,8x69		
PA.02.03.2507	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,0x69		
PA.02.03.2508	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,4x69		
PA.02.03.2509	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,8x69		
PA.02.03.2510	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,3x69		
PA.02.03.2511	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,7x69		
PA.02.03.2512	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,1x69		
PA.02.03.2513	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,5x69		
PA.02.03.2514	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,0x69		
PA.02.03.2515	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,5x69		
PA.02.03.2516	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,0x69		
PA.02.03.2517	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,5x69		
PA.02.03.2518	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 6,0x69		
PA.02.03.2519	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,6x69		
PA.02.03.2520	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,7x69		
PA.02.03.2521	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,8x69		
PA.02.03.2522	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,0x69		
PA.02.03.2523	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,4x69		
PA.02.03.2524	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,8x69		
PA.02.03.2525	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,3x69		
PA.02.03.2526	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,7x69		
PA.02.03.2527	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,1x69		
PA.02.03.2528	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,5x69		
PA.02.03.2529	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,0x69		
PA.02.03.2530	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,5x69		
PA.02.03.2531	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,0x69		
PA.02.03.2532	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,5x69		
PA.02.03.2533	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 6,0x69		
PA.02.03.2534	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,6x84		
PA.02.03.2535	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,7x84		
PA.02.03.2536	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,8x84		
PA.02.03.2537	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,0x84		
PA.02.03.2538	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,4x84		
PA.02.03.2539	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,8x84		
PA.02.03.2540	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,3x84		
PA.02.03.2541	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,7x84		
PA.02.03.2542	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,1x84		
PA.02.03.2543	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,5x84		
PA.02.03.2544	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,0x84		
PA.02.03.2545	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,5x84		
PA.02.03.2546	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,0x84		
PA.02.03.2547	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,5x84		
PA.02.03.2548	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 6,0x84		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE	ILUSTRAÇÃO
PA.02.03.2549	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,6x84		
PA.02.03.2550	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,7x84		
PA.02.03.2551	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,8x84		
PA.02.03.2552	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,0x84		
PA.02.03.2553	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,4x84		
PA.02.03.2554	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,8x84		
PA.02.03.2555	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,7x84		
PA.02.03.2556	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,1x84		
PA.02.03.2557	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,5x84		
PA.02.03.2558	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,0x84		
PA.02.03.2559	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,5x84		
PA.02.03.2560	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,0x84		
PA.02.03.2561	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,5x84		
PA.02.03.2562	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 6,0x84		
PA.02.03.2563	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,6x84		
PA.02.03.2564	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,7x84		
PA.02.03.2565	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,8x84		
PA.02.03.2566	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,0x84		
PA.02.03.2567	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,4x84		
PA.02.03.2568	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,8x84		
PA.02.03.2569	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,3x84		
PA.02.03.2570	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,7x84		
PA.02.03.2571	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,1x84		
PA.02.03.2572	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,5x84		
PA.02.03.2573	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,0x84		
PA.02.03.2574	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,5x84		
PA.02.03.2575	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,0x84		
PA.02.03.2576	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,5x84		
PA.02.03.2577	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 6,0x84		
PA.02.03.2578	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,6x99		
PA.02.03.2579	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,7x99		
PA.02.03.2580	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,8x99		
PA.02.03.2581	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,0x99		
PA.02.03.2582	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,4x99		
PA.02.03.2583	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,8x99		
PA.02.03.2584	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,3x99		
PA.02.03.2585	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,7x99		
PA.02.03.2586	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,1x99		
PA.02.03.2587	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,5x99		
PA.02.03.2588	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,0x99		
PA.02.03.2589	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,5x99		
PA.02.03.2590	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,0x99		
PA.02.03.2591	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,5x99		
PA.02.03.2592	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 6,0x99		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE	ILUSTRAÇÃO
PA.02.03.2593	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,6x99		
PA.02.03.2594	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,7x99		
PA.02.03.2595	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,8x99		
PA.02.03.2596	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,0x99		
PA.02.03.2597	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,4x99		
PA.02.03.2598	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,8x99		
PA.02.03.2599	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,3x99		
PA.02.03.2600	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,7x99		
PA.02.03.2601	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,1x99		
PA.02.03.2602	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,5x99		
PA.02.03.2603	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,0x99		
PA.02.03.2604	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,5x99		
PA.02.03.2605	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,0x99		
PA.02.03.2606	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,5x99		
PA.02.03.2607	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 6,0x99		
PA.02.03.2608	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,6x99		
PA.02.03.2609	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,7x99		
PA.02.03.2610	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,8x99		
PA.02.03.2611	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,0x99		
PA.02.03.2612	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,4x99		
PA.02.03.2613	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,0x99		
PA.02.03.2614	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,3x99		
PA.02.03.2615	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,7x99		
PA.02.03.2616	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,1x99		
PA.02.03.2617	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,5x99		
PA.02.03.2618	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,0x99		
PA.02.03.2619	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,5x99		
PA.02.03.2620	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,0x99		
PA.02.03.2621	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,5x99		
PA.02.03.2622	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 6,0x99		
PA.02.03.2623	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,6x114		
PA.02.03.2624	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,7x114		
PA.02.03.2625	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,8x114		
PA.02.03.2626	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,0x114		
PA.02.03.2627	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,4x114		
PA.02.03.2628	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,8x114		
PA.02.03.2629	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,3x114		
PA.02.03.2630	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,7x114		
PA.02.03.2631	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,1x114		
PA.02.03.2632	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,5x114		
PA.02.03.2633	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,0x114		
PA.02.03.2634	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,5x114		
PA.02.03.2635	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,0x114		
PA.02.03.2636	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,5x114		
PA.02.03.2637	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 6,0x114		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE	ILUSTRAÇÃO		
PA.02.03.2638	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,6x114				
PA.02.03.2639	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,7x114				
PA.02.03.2640	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,8x114				
PA.02.03.2641	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,0x114				
PA.02.03.2642	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,4x114				
PA.02.03.2643	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,8x114				
PA.02.03.2644	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,3x114				
PA.02.03.2645	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,7x114				
PA.02.03.2646	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,1x114				
PA.02.03.2647	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,5x114				
PA.02.03.2648	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,0x114				
PA.02.03.2649	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,5x114				
PA.02.03.2650	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,0x114				
PA.02.03.2651	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,5x114				
PA.02.03.2652	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 6,0x114				
PA.02.03.2653	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,6x114				
PA.02.03.2654	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,7x114				
PA.02.03.2655	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,8x114				
PA.02.03.2656	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,0x114				
PA.02.03.2657	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,4x114				
PA.02.03.2658	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,8x114				
PA.02.03.2659	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,3x114				
PA.02.03.2660	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,7x114				
PA.02.03.2661	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,1x114				
PA.02.03.2662	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,5x114				
PA.02.03.2663	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,0x114				
PA.02.03.2664	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,5x114				
PA.02.03.2665	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,0x114				
PA.02.03.2666	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,5x114				
PA.02.03.2667	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 6,0x114				
PA.02.03.2668	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,6x129				
PA.02.03.2669	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,7x129				
PA.02.03.2670	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 0,8x129				
PA.02.03.2671	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,0x129				
PA.02.03.2672	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,4x129				
PA.02.03.2673	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 1,8x129				
PA.02.03.2674	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,3x129				
PA.02.03.2675	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 2,7x129				
PA.02.03.2676	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,1x129				
PA.02.03.2677	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 3,5x129				
PA.02.03.2678	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,0x129				
PA.02.03.2679	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 4,5x129				
PA.02.03.2680	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,0x129				
PA.02.03.2681	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 5,5x129				
PA.02.03.2682	Broca Diamantada Esférica S-A DIAM. 6,0x129				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE	ILUSTRAÇÃO
PA.02.03.2683	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,6x129		
PA.02.03.2684	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,7x5129		
PA.02.03.2685	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 0,8x129		
PA.02.03.2686	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,0x129		
PA.02.03.2687	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,4x129		
PA.02.03.2688	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 1,8x129		
PA.02.03.2689	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,3x129		
PA.02.03.2690	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 2,7x129		
PA.02.03.2691	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,1x129		
PA.02.03.2692	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 3,5x129		
PA.02.03.2693	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,0x129		
PA.02.03.2694	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 4,5x129		
PA.02.03.2695	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,0x129		
PA.02.03.2696	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 5,5x129		
PA.02.03.2697	Broca Diamantada Esférica L-A DIAM. 6,0x129		
PA.02.03.2698	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,6x129		
PA.02.03.2699	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,7x129		
PA.02.03.2700	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 0,8x129		
PA.02.03.2701	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,0x129		
PA.02.03.2702	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,4x129		
PA.02.03.2703	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 1,8x129		
PA.02.03.2704	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,3x129		
PA.02.03.2705	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 2,7x129		
PA.02.03.2706	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,1x129		
PA.02.03.2707	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 3,5x129		
PA.02.03.2708	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,0x129		
PA.02.03.2709	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 4,5x129		
PA.02.03.2710	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,0x129		
PA.02.03.2711	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 5,5x129		
PA.02.03.2712	Broca Diamantada Esférica M-A DIAM. 6,0x129		









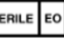
COMPOSIÇÃO

As Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec são fabricadas em Aço Inoxidável UNS S42000 com revestimento diamantado na parte ativa.

O Aço Inoxidável atende aos requisitos especificados pela norma ASTM F899 - *Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments*.



SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NO RÓTULO

 REF	Código do Produto		Data de Fabricação		Validade
 LOT	Número do Lote		Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Manter afastado de luz solar ou calor
	Manter seco		Consultar as Instruções para utilização		Estéril por Óxido de Etileno

Os símbolos utilizados no rótulo seguem os requisitos da norma ABNT NBR ISO 15223-1 - Produtos para saúde - Símbolos a serem utilizados em rótulos, rotulagem e informações a serem fornecidas de produtos para saúde Parte 1: Requisitos gerais.

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

As Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec são instrumentais confeccionados para assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos. Esses instrumentais foram projetados para serem utilizados em motores Cirúrgicos, tais como: TPS - Total Performance System, CORE, ambos do fabricante Stryker ou qualquer outro que confira total compatibilidade para o uso das Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec.

Especialidades em que podem ser utilizadas as Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec: Osteotomia Mandibular Anterior, Osteotomia Mandibular Posterior, Osteotomia Posterior Mandibular Dentealveolar, Assimetria Facial, Reconstrução Óssea, Orbital Hipertelorismo, Genioplastia, Osteotomia LeFort I, LeFort II e LeFort III, Correção Cantal Medial e Lateral, Disostese Mandibulofacial, Deformidades Traumáticas: Tratamento Primário e Secundário, Deformidades Secundárias a Tumores, Síndrome Apert e Crouzon e Fissuras Faciais.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/MECANISMO DE AÇÃO

As Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec devem ser acopladas a uma peça de mão específica, e conectada em um motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião as respectivas modalidades de uso: perfuração, alargamento e dissecação dos ossos e dos tecidos duros.

Podendo ser utilizada em diversas especialidades cirúrgicas onde seja necessário realizar procedimentos tais quais os mencionados na Indicação de Uso.

MODO DE USO DO PRODUTO

As Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec são fornecidas estéreis por Óxido de Etileno - ETO. Abra a embalagem puxando pela aba de abertura na extremidade, retire o instrumental da embalagem. O manuseio deve seguir técnicas assépticas utilizadas nos centros cirúrgicos.

Inspeção da Broca:

Verificar através de inspeção técnica se há danos físicos na broca tais como: envergaduras, amassados, ou qualquer outra característica associada à conservação e sua funcionalidade. Essa inspeção técnica deve ser realizada por profissional habilitado.



Caso haja alguma peça reprovada, a mesma deve ser separada e destinada para descarte.

Conecte a broca na peça de mão, certificando-se que esteja bem fixada, interligue a peça de mão ao motor cirúrgico, selecione a potência do motor de acordo com a necessidade exigida pelo procedimento e execute a operação.

O cirurgião encarregado de executar o procedimento é o responsável pela escolha dos parâmetros, pela seleção dos instrumentos e a técnica cirúrgica adequada para boa execução do ato cirúrgico. Assim na qualidade de fabricante a Traumec não faz recomendação sobre a técnica cirúrgica a ser empregada.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

As Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec devem ser armazenadas em local limpo longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura inferior a +55° e Umidade Relativa máxima de 85%.

As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico.

Os cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE

As Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec devem ser transportadas em local limpo, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura inferior a +55° a Umidade Relativa máxima de 85% de forma a impedir qualquer dano ou alteração em suas características.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

As Brocas Cirúrgica Diamantada Traumec devem ser manipuladas cuidadosamente e individualmente, evitando batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano deve ser separado, segregado e descartado.

DESCARTE

Quanto a necessidade de descarte do instrumental, o mesmo deve ser inutilizado imediatamente. O descarte dos instrumentos deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar os instrumentais seguir os procedimentos legais locais do país para descarte de produtos potencialmente contaminantes. Recomendamos a utilização da norma RDC nº 222 de 2018 que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.



ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.
- Produto passível de reprocessamento, entretanto fabricante recomenda uso único.
- Não utilizar a broca se houver sinais de danos a mesma.

PRECAUÇÕES

- Não tentar retrabalhar uma broca, isso afetará a função específica de seu uso alterando suas dimensões gerais. Qualquer retrabalho poderá causar desgaste excessivo, descaracterizando sua função, trazendo grandes prejuízos ao uso pretendido e ao paciente.
- O uso contínuo ou prolongado de uma broca poderá causar desgaste na mesma e acarretar possíveis rupturas. Uma broca desgastada fatalmente deixará o procedimento cirúrgico mais prolongado, podendo ainda causar necrose térmica devido ao aquecimento por fricção.
- Para bons resultados cirúrgicos e para evitar qualquer perda do fio de corte, necrose térmica devido ao aquecimento por fricção, arqueamento e risco de ruptura, utilizar sempre brocas novas a cada procedimento cirúrgico.
- O uso de irrigação durante a operação com brocas reduzirá a possibilidade à necrose térmica.
- Assegurar-se de que a broca esteja devidamente encaixada e travada na peça de mão antes de acionar o motor cirúrgico.
- Não tentar inserir ou remover a broca enquanto a peça de mão estiver em funcionamento. O não atendimento desta instrução pode resultar em lesão para a equipe da sala de cirurgia.
- Não aplicar pressão excessiva como por exemplo, flexionar ou arquear as brocas. A pressão excessiva pode dobrar ou fraturar o instrumental, causando danos ao tecido e/ou perda do controle tátil. O não atendimento desta instrução pode resultar em lesão para o paciente e/ou para a equipe da sala de cirurgia.

CONTRAINDICAÇÕES

Este produto não pode ser utilizado em procedimentos no sistema nervoso central ou sistema circulatório central.

EFEITOS ADVERSOS

Não aplicável.

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para reclamações e/ou esclarecimento de dúvidas referente ao produto, entrar em contato com a Traumec Tecnologia e Implantes Ortopédicos através dos seguintes canais: sac@traumec.com.br ou pelo fone +55 (19) 3522-1177. Estes dados também constam na Instruções de Uso e rótulos na embalagem do produto.

Para o envio do produto ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do produto médico. A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto, bem como as condições de manuseio, tais como métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.





INSTRUÇÃO DE USO
Broca Cirúrgica Diamantada Traumec
Registro ANVISA nº 80455630015

DADOS DO FABRICANTE

Traumec Tecnologia e Implantes Ortopédicos Importação e Exportação Ltda

CNPJ: 09.123.223/0001-10

Rua 1CA, nº 202 - Cidade Azul II - Rio Claro - CEP 13505-820 - Brasil

Fone: +55 (19) 3522-1177 - www.traumec.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: +55 (19) 9 9600-1557 | e-mail: sac@traumec.com.br

Revisão 03 - 07/07/2022

