

Instrução de Uso

Nome Comercial: **Agulha para Microdissecção Traumec**
Nome Técnico: **Eletrodo Descartável**

Descrição:



A agulha para microdissecção Traumec é parte de um equipamento médico (acessório), para ser conectado à ponta de uma caneta monopolar utilizada em Eletrocirurgia.

A Agulha para Microdissecção Traumec é confeccionada em haste de aço inoxidável em bitola padrão de 1,6mm e 2,4mm, compatível com a maioria das peças de mão (Canetas Monopolar) utilizadas para cauterio, cuja extremidade recebe uma ponta de liga de tungstênio, material que confere alta resistência a temperatura, permitindo um uso mais efetivo, mantendo a ponta sempre afiada. Esta haste é revestida com um polímero isolante resistente a altas temperaturas, material altamente dielétrico, que tem por finalidade principal proteger o paciente contra eventuais traumas nos tecidos adjacentes.

A concepção de uma ponta em liga de tungstênio neste dispositivo confere ao mesmo uma propriedade hemostática muito grande, proporcionada pelo aumento da densidade da corrente, permitindo assim uma dissecção limpa e precisa do tecido macio. Sendo a ponta polida, dando uma característica adstringente ao produto, reduzindo a aderência de tecidos e facilitando assim sua limpeza.

Aplicação:

A Agulha para Microdissecção Traumec trata-se de um dispositivo eletrocirúrgico monopolar com uma gama enorme de aplicação, sendo seu desenvolvimento pautado no que há de melhor em tecnologia para instrumentos de cortes, conferindo a este uma alta performance no que diz respeito a ações de cortes, dissecção e cauterio de tecido mole. Dentre as suas aplicações podemos citar a Tensilotomia e Blefaroplastias.

Apresentação:

A Agulha para Microdissecção Traumec é fornecida esterilizada por Óxido de Etileno (ETO), duplamente embalada, conforme ilustra a figura abaixo:



Está disponível nos seguintes modelos:

Advertências e Precauções de manuseio:

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Produto de uso único, não reutilizar.
- Este produto não pode ser utilizado em procedimentos no sistema nervoso central ou sistema circulatório central.
- A Tensilotomia e a Blefaroplastia estão incluídas na literatura referenciada para demonstração da respectiva utilização nestes procedimentos. No entanto, o efeito cosmético alcançado pela utilização deste dispositivo na blefaroplastia ainda não foi avaliado.
- Não utilizar a agulha se houver sinais de danos a mesma.
- Antes de usar, certifique-se de que a agulha esteja conectada firmemente à caneta.
- Manusear a agulha somente pela parte tubular. Não dobrar nem endireitar a agulha.
- Colocar a agulha de modo a não existir folga entre a agulha e caneta de mão. O eixo metálico não pode entrar em contato com o tecido, podendo causar lesões.
- Antes de conectar ou retirar o eletrodo (Agulha), certifique-se de que a caneta não esteja conectada à unidade eletrocirúrgica/bisturi eletrônico ou que a unidade eletrocirúrgica/bisturi eletrônico esteja DESLIGADA/O ou em modo de espera.
- Utilize sempre com geradores comercializados legalmente, compatíveis com dispositivos eletrocirúrgicos monopolares e que atendam a legislação da ANVISA.
- Não conecte acessórios molhados ou com umidade interna ao gerador. Pode haver risco de choque elétrico

Informações Importantes:

- Utilize baixa potência. Preferencialmente comece com 3 a 5 watts e aumente gradualmente até parar o arraste do tecido, obtendo, assim, melhores resultados em sua utilização.
- Utilize apenas a ponta da agulha, para obter um corte de maior precisão.

Limpeza:

- Remova o tecido, ou outras matérias da ponta da agulha, passando-a suavemente por uma gaze esterilizada e umedecida.
- Não utilize produtos abrasivos para a limpeza.

Cuidados Adicionais:

- O ambiente de armazenamento deve ser seco, limpo e isento de contaminação particulada.

Instrução de Uso:

1. Abrir a embalagem puxando pelas abas.
2. Retire a agulha da embalagem adotando técnica asséptica, preferencial no centro cirúrgico, de modo a não contaminar a mesma.
3. Antes de usar, certifique-se de que a agulha esteja firmemente colocada na caneta.



Nome Técnico: Eletrodo Descartável

Nome Comercial: Agulha para Microdissecção Traumec

Modelo: XXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXXXX

Quantidade: XXX

Data de Fabricação: XX/XX/XX

Esterilizado por: ETO

Lote: XXXXXX

Material: XXXXXXXXXXXX

Validade: XX/XX/XX

Registro Anvisa n.º: XXXXXXXXXXXX

PRODUTO DE USO ÚNICO

PRODUTO ESTÉRIL – NÃO REPROCESSAR

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, MANIPULAÇÃO,
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: **VER INSTRUÇÕES DE USO.**

Fabricado por: Traumec Tecnologia e Implantes LTDA ME

Endereço: Rua 1A-JC, nº138, Bairro: Jardim Centenário

Cidade: Rio Claro – UF: SP CEP -13503-510

CNPJ: 09.123.223/0001-10 – **INDÚSTRIA BRASILEIRA**

Atendimento ao Consumidor - Fone/Fax: (19) 3524-7498

E-mail: sac@traumec.com.br