

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: Ponta de Ultra-som

NOME COMERCIAL: Pontas Ativas Ultrassônicas Diamantadas TRAUMEC

PRODUTO DE USO MÉDICO PRODUTO ESTÉRIL

ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observação destes pontos poderá levar à ocorrência de complicações.

A família de PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC, é composta por instrumentais indicados para procedimentos cirúrgicos e ortodônticos. As Pontas Ativas Ultrassônicas Diamantadas TRAUMEC devem ser acopladas a um adaptador específico, e este conectado ao motor cirúrgico (de micro vibração ultrassônica), podendo ser utilizadas em diversas especialidades cirúrgicas onde seja necessário realizar procedimentos de corte e desgaste em ossos e tecidos enrijecidos.

As PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC são fornecidas estéreis por Raio Gama (CO-60).



Os instrumentais presentes na família de PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC, são de **uso único**.

2. Materiais Utilizados na Fabricação das PONTAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC.

As PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC são fabricadas em aço inoxidável (AISI 420B) conforme (NBR13911).

3. Apresentação

A tabela abaixo (tabela 1) traz a relação de produtos pertencentes à família de PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.13.0001	Ponta com Aba Diamantada	Aço Inoxidável AISI 420B (NBR 13911)	
PA.02.13.0002	Ponta Cilíndrica Diamantada	Aço Inoxidável AISI 420B (NBR 13911)	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.13.0003	Ponta Esférica Diamantada	Aço Inoxidável AISI 420B (NBR 13911)	
PA.02.13.0004	Ponta Cônica Diamantada	Aço Inoxidável AISI 420B (NBR 13911)	
PA.02.13.0005	Ponta de Cônica Longa Diamantada	Aço Inoxidável AISI 420B (NBR 13911)	
PA.02.13.0006	Ponta de Cônica Curta Diamantada	Aço Inoxidável AISI 420B (NBR 13911)	

Obs: imagens ilustrativas

4. Princípio de Funcionamento / Modo de Uso

A família de PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC é formada pelos instrumentais citados acima, e tem como função realizar cortes e desgaste em ossos e tecidos enrijecidos. As Pontas Ativas Ultrassônicas Diamantadas devem ser utilizadas em conjunto com um adaptador e acopladas em um motor cirúrgico de micro vibração ultrassônica.

5. Condições de Armazenamento

PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC devem ser armazenadas em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +10° à +40°C – Umidade Relativa: 30 a 85%. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.



6. Condições de Transporte e Manuseio

As PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC devem ser transportadas e manuseadas em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +10° à +40°C – Umidade Relativa: 30 a 85% de forma a impedir qualquer dano ou alteração em suas características.

Observação: Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

7. Indicações

As Pontas Ativas Ultrassônicas Diamantadas TRAUMEC são instrumentos confeccionados para assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso cortar e desgastar ossos e tecidos enrijecidos.

Esses instrumentos foram projetados para serem utilizados em motores Cirúrgicos de Ultrassom que confirmam total compatibilidade para o uso das Pontas Ativas Ultrassônicas Diamantadas TRAUMEC.

As Pontas Ativas Ultrassônicas Diamantadas TRAUMEC, podem ser utilizadas em:

- Cirurgia oral: extração, apicectomia, cistectomia e osteogênese de distração;
- Implantologia: Osteotomia de abertura no osso, expansão de fenda, coleta de pedaços de osso, coleta de osso monocortical, osteoplastia, preparação final do local de implantação, extração para implantação imediata, elevação da membrana de Schneider.
- Cirurgia Periodontal: osteotomia e osteoplastia, coleta de tecido para osso em cirurgia regenerativa, fragmentação de raiz, planificação de raiz.
- Ortodontia cirurgia: exposição ou extração de dentes que não sofreram erupções, cortocotomia ortodôntica.

8. Contra-Indicações

As PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC não devem ser utilizadas em regiões de infecção ativa.

9. Advertências

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Produto de uso único, PROIBIDO REPROCESSAR.
- Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado.
- Antes de iniciar o procedimento, devem ser identificadas as estruturas anatômicas do paciente a fim de garantir que a utilização não comprometa a saúde do paciente.
- Não exercer força excessiva no manuseio das PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC, pois a pressão excessiva pode provocar danos em estruturas anatômicas e/ou nos tecidos.

10. Precauções

- Os procedimentos cirúrgicos devem ser efetuados apenas por pessoas especializadas, que estejam familiarizadas com esses procedimentos.
- Posicionar corretamente o paciente a fim de obter a melhor posição para a manipulação das PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC, de modo a favorecer o procedimento cirúrgico.
- Quando estiver utilizando as PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC recorra a dispositivos de estabilização adicionais.



11. Modelo de Rotulagem

Nome Técnico: PONTA DE ULTRA-SOM

Descrição: PONTA COM ABA DIAMANTADA

Nome Comercial: PONTAS ATIVAS ULTRASSÔNICAS DIAMANTADAS TRAUMEC

Código: PA.02.13.0001

Lote: XXXXXX

Quantidade: 01PÇ

Esterilizado por: Raio Gama

Data de Fabricação: DD/MM/AAAA

Prazo de Validade: DD/MM/AAAA

Registro Anvisa nº: 80455630028

Matéria-prima: XXXXXXXXXXX

**PRODUTO ESTÉRIL
PROÍBIDO REPROCESSAR**

VERIFIQUE A REVISÃO DA INSTRUÇÃO DISPONÍVEL NO SITE (DEVE SER A MESMA DESSA ROTULAGEM)
AS INSTRUÇÕES DE USO PODEM SER SOLICITADAS PELO SAC@TRAUMEC.COM.BR OU
FONE +55 (19) 3522 1177 SEM CUSTO ADICIONAL

Armazenar em local limpo e seco, longe do calor e ao abrigo de luz direta
sob temperatura +10°C a + 40°C - umidade relativa 85% máxima
“VER INSTRUÇÃO DE USO”

Instrução de Uso nº 80455630028 – Rev.01 disponível no website: www.traumec.com.br

TRAUMEC – TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.123.223/0001-10
RUA 1 CA, 202 – Condomínio Cidade Azul II – Distrito Industrial
CEP 13505-820 - Rio Claro/SP

