

## INSTRUÇÕES DE USO

**NOME TÉCNICO:** Brocas Cirúrgicas

**NOME COMERCIAL:** Lâminas de Shaver TRAUMEC

### PRODUTO DE USO MÉDICO PRODUTO ESTÉRIL

**ATENÇÃO:** Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observação destes pontos poderá levar à ocorrência de complicações.

#### 1. Identificação do Produto

As **Lâminas de Shaver TRAUMEC** são ferramentas destinadas as seguintes aplicações: exérese de corpos livres, lesões da longa porção do bíceps, artrites e sinovites de ombro, cirurgia da articulação acromioclavicular, lesões de “labrum”, lesões da coifa dos rotadores, ombro congelado, bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial, lesões do manguito rotador, tendinite calcária do ombro, lesões de menisco, lesões de ligamentos, deslocamento de patela, lesões de tendão muscular, síndrome do impacto ulno-carpal, sinovite crônica, lesões condriais por desbridamento, ressecção óssea, desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose, desbridamento da artrite séptica e lesões do ligamento da cabeça do fêmur.

As **Lâminas de Shaver TRAUMEC** são uma família de produtos destinados ao uso em cirurgias artroscópicas. Elas são confeccionadas em diversos formatos (que correspondem ao modelo da lâmina) e têm a finalidade de atender as diferentes necessidades do cirurgião durante o procedimento cirúrgico.

As **Lâminas de Shaver TRAUMEC** são fornecidas em embalagens individuais, estéreis por ETO (óxido etileno).


As **Lâminas de Shaver TRAUMEC** são produtos recomendados para uso único, e têm seu reprocessamento proibido (Conforme RE 2605/2006) item 42 (Lâmina de Shaver com diâmetro interno que 3 mm).










## 2. Materiais Utilizados na Fabricação das LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC.

As LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC são fabricadas em aço inoxidável (AISI 420) conforme (NBR13911) e componentes em ABS e em policarbonato.

## 3. Apresentação







A tabela abaixo (tabela 1) traz a relação de produtos pertencentes à família de LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0001	Lâmina de Shaver 1,9 mm Perfil Completo Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0002	Lâmina de Shaver 1,9 mm Dentes Duplos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0003	Lâmina de Shaver 1,9 mm Broca Esférica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0004	Lâmina de Shaver 1,9 mm Broca Cilíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0005	Lâmina de Shaver 1,9 mm Broca Oval Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0006	Lâmina de Shaver 1,9 mm Dentes Internos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0007	Lâmina de Shaver 1,9 mm Dentes Externos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0008	Lâmina de Shaver 1,9 mm Broca Cônica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0009	Lâmina de Shaver 1,9 mm Podadora Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	

**Obs:** imagens ilustrativas












CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0010	Lâmina de Shaver 2,5 mm Perfil Completo Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0011	Lâmina de Shaver 2,5 mm Dentes Duplos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0012	Lâmina de Shaver 2,5 mm Broca Esférica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0013	Lâmina de Shaver 2,5 mm Broca Cilíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0014	Lâmina de Shaver 2,5 mm Broca Dual Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0015	Lâmina de Shaver 2,5 mm Dentes Internos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0016	Lâmina de Shaver 2,5 mm Dentes Externos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0017	Lâmina de Shaver 2,5 mm Broca Cônica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0018	Lâmina de Shaver 2,5 mm Podadora Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	

**Obs:** imagens ilustrativas

				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0019	Lâmina de Shaver 3,0 mm Perfil Completo Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0020	Lâmina de Shaver 3,0 mm Dentes Duplos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0021	Lâmina de Shaver 3,0 mm Broca Esférica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0022	Lâmina de Shaver 3,0 mm Broca Cilíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0023	Lâmina de Shaver 3,0 mm Broca Oval Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0024	Lâmina de Shaver 3,0 mm Dentes Internos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0025	Lâmina de Shaver 3,0 mm Dentes Externos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0026	Lâmina de Shaver 3,0 mm Broca Cônica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0027	Lâmina de Shaver 3,0 mm Podadora Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	







**Obs:** imagens ilustrativas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0028	Lâmina de Shaver 3,5 mm Perfil Completo Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0029	Lâmina de Shaver 3,5 mm Dentes Duplos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0030	Lâmina de Shaver 3,5 mm Broca Esférica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0031	Lâmina de Shaver 3,5 mm Broca Cilíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0032	Lâmina de Shaver 3,5 mm Broca Ovali Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0033	Lâmina de Shaver 3,5 mm Dentes Internos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0034	Lâmina de Shaver 3,5 mm Dentes Externos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0035	Lâmina de Shaver 3,5 mm Broca Cônica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0036	Lâmina de Shaver 3,5 mm Podadora Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	










**Obs:** imagens ilustrativas







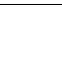


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0037	Lâmina de Shaver 4,2 mm Purifi Completo Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0038	Lâmina de Shaver 4,2mm Dentes Duplos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0039	Lâmina de Shaver 4,2 mm Broca Cilíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0040	Lâmina de Shaver 4,2 mm Broca Cilíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0041	Lâmina de Shaver 4,2 mm Broca Oval Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0042	Lâmina de Shaver 4,2 mm Dentes Internos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0043	Lâmina de Shaver 4,2 mm Dentes Externos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0044	Lâmina de Shaver 4,2 mm Broca Cônica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0045	Lâmina de Shaver 4,2 mm Podadora Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	

**Obs:** imagens ilustrativas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0046	Lâmina de Shaver 4,5 mm Perfil Completo Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0047	Lâmina de Shaver 4,5 mm Dentes Duplos Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0048	Lâmina de Shaver 4,5 mm Broca Estérica Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0049	Lâmina de Shaver 4,5 mm Broca Cilíndrica Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0050	Lâmina de Shaver 4,5 mm Broca Oval Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0051	Lâmina de Shaver 4,5 mm Dentes Internos Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0052	Lâmina de Shaver 4,5 mm Dentes Externos Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0053	Lâmina de Shaver 4,5 mm Broca Cônica Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0054	Lâmina de Shaver 4,5 mm Podadora Conexo LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	

**Obs:** imagens ilustrativas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0055	Lâmina de Shaver 5,0 mm Perfil Completo Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0056	Lâmina de Shaver 5,0 mm Dentes Duplos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0057	Lâmina de Shaver 5,0 mm Broca Esférica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0058	Lâmina de Shaver 5,0 mm Broca Clíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0059	Lâmina de Shaver 5,0 mm Broca Oval Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0060	Lâmina de Shaver 5,0 mm Dentes Internos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0061	Lâmina de Shaver 5,0 mm Dentes Externos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0062	Lâmina de Shaver 5,0 mm Broca Cônica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0063	Lâmina de Shaver 5,0 mm Podadora Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	

**Obs:** imagens ilustrativas



				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.20.0064	Lâmina de Shaver 5,5 mm Perfil Completo Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0065	Lâmina de Shaver 5,5 mm Dentes Duplos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0066	Lâmina de Shaver 5,5 mm Broca Estérica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0067	Lâmina de Shaver 5,5 mm Broca Cilíndrica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0068	Lâmina de Shaver 5,5 mm Broca Oval Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0069	Lâmina de Shaver 5,5 mm Dentes Internos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0070	Lâmina de Shaver 5,5 mm Dentes Externos Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0071	Lâmina de Shaver 5,5 mm Broca Cônica Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	
PA.02.20.0072	Lâmina de Shaver 5,5 mm Podadora Conexão LV2	Utilizado em tecidos moles para pequenas remoções	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911) / ABS / Policarbonato	

**Obs:** imagens ilustrativas

#### 4. Princípio de Funcionamento / Modo de Uso

As **Lâminas de Shaver TRAUMEC** são ferramentas destinadas a serem utilizadas em conjunto com aparelhos de mão (handpieces), e são compatíveis com os aparelhos da Cormed, Linvatec e Arthrex devendo ser corretamente conectadas aos mesmos antes do uso. Os aparelhos de mão, por sua vez, são conectados a um controlador mestre e a uma bomba de sucção usando o tubo do cabo e do conector.

Desta forma, com as **Lâminas de Shaver** devidamente conectadas, elas passam a desenvolver os movimentos de rotação, que devem ser entre 700 – 1000 rotações por minuto (RPM).

#### 5. Condições de Armazenamento

LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC devem ser armazenadas em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +10° à +40°C – Umidade Relativa: 30 a 85%. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

#### 6. Condições de Transporte e Manuseio

As LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC devem ser transportadas e manuseadas em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +10° à +40°C – Umidade Relativa: 30 a 85% de forma a impedir qualquer dano ou alteração em suas características.

**Observação:** Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

#### 7. Indicações

As **Lâminas de Shaver TRAUMEC** foram projetadas para as seguintes aplicações: exérese de corpos livres, lesões da longa porção do bíceps, artrites e sinovites do ombro, cirurgia da articulação acromioclavicular, lesões do “labrum”, lesões da coifa dos rotadores, ombro congelado, bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial, lesões do manguito rotador, tendinite calcária do ombro, lesões de menisco, lesões de ligamentos, deslocamento da patela, lesões de tendão muscular, síndrome do impacto ulno-carpal, sinovite crônica, lesões condriais por desbridamento, ressecção óssea, desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose, desbridamento da artrite séptica e lesões do ligamento da cabeça do fêmur.

## **8. Contra-Indicações**

As LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC não devem ser utilizadas em regiões de infecção ativa.

## **9. Advertências**

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Produto de uso único, PROIBIDO REPROCESSAR.
- Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado.
- Antes de iniciar o procedimento, devem ser identificadas as estruturas anatômicas do paciente a fim de garantir que a utilização não comprometa a saúde do paciente.
- Não exercer força excessiva no manuseio das LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC, pois a pressão excessiva pode provocar danos em estruturas anatômicas e/ou nos tecidos.

## **10. Precauções**

- Os procedimentos cirúrgicos devem ser efetuados apenas por pessoas especializadas, que estejam familiarizadas com esses procedimentos.
- Posicionar corretamente o paciente a fim de obter a melhor posição para a manipulação das LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC, de modo a favorecer o procedimento cirúrgico.
- Quando estiver utilizando as LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC recorra a dispositivos de estabilização adicionais.

**Nome Técnico:** Brocas Cirúrgicas

**Nome Comercial:** LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC

**Modelo Comercial:** LÂMINAS DE SHAVER TRAUMEC

**Código:** PA.02.20.0001

**Lote:** XXXXXX

**Quantidade:** 01 PÇ

**Registro ANVISA n.º:** 80455630036

**Esterilizado por:** Óxido Etileno (ETO)

**Fabricação:** XX/XX/XXXX

**Validade:** XX/XX/XXXX

**Material:** XXXXXX

**Responsável Técnico:** José Luiz Caritá - CREA-SP – 0685038754

**PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REUTILIZAR**

**PRODUTO ESTÉRIL – PROIBIDO REPROCESSAR**

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, MANIPULAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO:

**VER INSTRUÇÕES DE USO.**

**Fabricado por:** TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Endereço:** Rua 1A JC, nº138, Jardim Centenário

**Cidade:** Rio Claro - UF: SP CEP: 13503-510

**CNPJ:** 09.123.223/0001-10

**Atendimento ao Consumidor** - Fone: 55(19) 3522-1177 / Fax: 55(19) 3522-1174

**Email:** [sac@traumec.com.br](mailto:sac@traumec.com.br)

**[www.traumec.com.br](http://www.traumec.com.br)**