

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: Pinças

NOME COMERCIAL: Pinça Artroscópica Canulada Estéril TRAUMEC

PRODUTO DE USO MÉDICO PRODUTO ESTÉRIL

ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observação destes pontos poderá levar à ocorrência de complicações.

1. Identificação do Produto

A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é um produto para saúde utilizado em intervenção e apoio cirúrgico e embora deva ser utilizada em cirurgia artroscópica de qualquer articulação, a sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é fornecida estéril por Óxido de Etileno (ETO). A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é de uso único.

A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é fornecida montada, pronto para uso. Produto estéril, devendo ser descartado após sua utilização.

2. Materiais Utilizados na Fabricação das Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC


As Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC são fabricadas em aços inoxidáveis AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma ABNT NBR ISO 7153-1.

3. Apresentação

A tabela abaixo (tabela 1) traz a relação de produtos pertencentes à família de **PINÇAS ARTROSCÓPICAS CANULADAS ESTÉREIS TRAUMEC**.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.15.0008	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TRO01M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	



PA.02.15.0009	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR002M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0010	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR003M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0011	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR004M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0012	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR005M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0013	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR006M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0014	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR007M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	

4. Princípio de Funcionamento / Modo de Uso

As **Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC** possuem a função de executar tarefas diversas no campo cirúrgico com precisão e segurança, para segurar, coletar, suturar, inserir, extrair, afastar, selecionar, soltar, furar e agarrar; tanto os tecidos e seus fragmentos, como outros instrumentos.

5. Condições de Armazenamento

As pinças devem ser armazenadas em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +10° à +40°C - Umidade Relativa: 30 a 85%. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas



no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotadas em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

6. Condições de Transporte e Manuseio

As pinças devem ser transportadas em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz em sua embalagem original, sob Temperatura: +10° à +40°C - Umidade Relativa: 30 a 85% de forma a impedir qualquer dano ou alteração em suas características.

As pinças devem ser manipuladas cuidadosamente e individualmente, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

7. Indicações

As **Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC** executam tarefas diversas no campo cirúrgico com precisão e segurança, para segurar, coletar, suturar, inserir, extrair, afastar, selecionar, soltar, furar e agarrar; tanto os tecidos e seus fragmentos, como outros instrumentos.

8. Contra-Indicações

Não se Aplica.

9. Advertências

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada. Produto de Uso Único, proibido reprocessar.

Não utilizar se houver sinais de danos.

Antes de utilizar as pinças leia atentamente as instruções de uso.

Não se devem reutilizar as Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis, pois as mesmas são de uso único.

Após o uso das Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC, elas deverão ser descartadas.

10. Precauções

- Antes de utilizar as pinças, leia atentamente as instruções de uso
- Não se deve reutilizar as Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis, pois os mesmos são de uso único
- Após o uso das Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC, elas deverão ser descartadas.

11. Modelo de Rotulagem

Nome Técnico: Pinças



Descrição: PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TR001M

Nome Comercial: Pinça Artroscópica Canulada Estéril TRAUMEC

Código: PA.02.15.0008

Lote: XXXXXX

Quantidade: 01 PÇ

Esterilizado por: Óxido de Etileno (ETO)

Data de Fabricação: DD/MM/AAAA

Prazo de Validade: DD/MM/AAAA

Registro ANVISA n.º: 80455630054

Matéria-prima: XXXXXXXXXXXX

PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REUTILIZAR PRODUTO

ESTÉRIL – PROIBIDO REPROCESSAR

VERIFIQUE A REVISÃO DA INSTRUÇÃO DISPONÍVEL NO SITE (DEVE SER A MESMA DESSA ROTULAGEM)
AS INSTRUÇÕES DE USO PODEM SER SOLICITADAS PELO SAC@TRAUMEC.COM.BR OU FONE +55 (19) 3522 1177 SEM CUSTO ADICIONAL

Armazenar em local limpo e seco, longe do calor e ao abrigo de luz direta
sob temperatura +10°C a + 40°C - umidade relativa 85% máxima
“VER INSTRUÇÃO DE USO”

Instrução de Uso nº 80455630054 – Rev.02 disponível no website: www.traumec.com.br
TRAUMEC – TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 09.123.223/0001-10

RUA 1 CA, 202 – Condomínio Cidade Azul II – Distrito Industrial

CEP 13505-820 - Rio Claro/SP

