

**INSTRUÇÃO DE USO**

**Nome Técnico:** Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados

**Nome Comercial:** Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec

**Matéria-prima:** Liga de Titânio F136 e Titânio Puro F67

**Produto Não Estéril - Esterilizar antes do uso**

**Método recomendado:** Esterilização a Vapor

**Validade:** Indeterminado

**Dispositivo Médico de uso único - PROIBIDO REPROCESSAR**

Verificar a revisão da Instrução de Uso disponível no site [www.traumec.com.br](http://www.traumec.com.br), pois deve ser a mesma da rotulagem do produto. A Instrução de Uso de forma eletrônica está disponível para download através do site [www.traumec.com.br](http://www.traumec.com.br) ou solicitada impressa pelo e-mail: [sac@traumec.com.br](mailto:sac@traumec.com.br) ou pelo fone: +55 (19) 3522-1177 ou +55 (19) 99600-1557, sem custo adicional, inclusive de envio.

**ATENÇÃO:** Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Atentar para todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observância das informações aqui declaradas, poderá levar a complicações durante a utilização deste produto.

**Descrição do produto médico**

O Sistema de Fixação Rígida – Footfix TRAUMEC foi desenvolvido para fixação interna rígida dos ossos do médio pé e do ante pé, sendo eles tarso, metatarso e falanges.

O Sistema de Fixação Rígida – Footfix TRAUMEC é um sistema de fixação rígida, composto por placas e parafusos, proporcionando estabilização e fixação estável dos fragmentos ósseos, especialmente em casos de ossos osteopênicos.

Esse produto é apresentado em vários tipos e tamanhos de placas e parafusos, compatíveis entre si, para que o cirurgião faça sua escolha de acordo com as diferentes estruturas anatômicas dos ossos do pé.

As placas possuem design arredondado minimizando dano às partes moles.

O Sistema de Fixação Rígida - Footfix TRAUMEC é indicado em casos de fraturas, deformidades, cirurgias de revisão e reimplantação óssea do tarso, metatarso e falanges.



A Figura 1 apresenta uma possível montagem do Sistema de Fixação Rígida – Footfix TRAUMEC.



Figura 1 - Montagem do Sistema de Fixação Rígida – Footfix TRAUMEC.

Os implantes são de uso único comercializados na forma não estéril e o sistema é caracterizado como aberto.

A Figura 2 mostra os produtos que compõe este sistema.

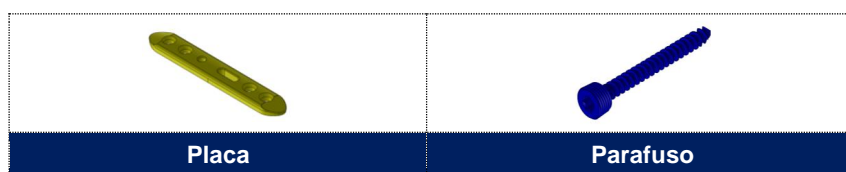


Figura 2: Identificação dos componentes do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec

### Composição dos produtos

A Tabela 1 apresenta a classificação da matéria-prima utilizada nos produtos.

Tabela 1 - Classificação química da matéria-prima.

Produto	Material	Norma Aplicada
Placas	Titânio Puro Grau 2	ASTM F67*
Parafusos	Liga de Titânio Ti6Al4V	ASTM F136**

\* Conforme norma ASTM F67 - Standard Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications.  
\*\* Conforme norma ASTM F136 - Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications.

### Compatibilidade de materiais

Devem ser utilizados implantes da mesma marca, pois foram projetados para tais combinações observando acabamento superficial e tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos, como geometrias, que podem interferir nas combinações. Por isso, implantes metálicos de diferentes fabricantes não são recomendados por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.



### Apresentação

Os componentes do Sistema de Fixação Rígida – Footfix Traumec apresentam-se nas seguintes dimensões que permitem o profissional escolher o modelo mais adequado conforme o caso clínico.

Tabela 2: Apresentação dos componentes do sistema

IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0718	Placa Locking de Fusão Reta 2.4/2.7 X 40mm Footfix	Tratamento de fraturas na região de interface entre médiopé e retropé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0719	Placa Locking de Fusão Reta 2.4/2.7 X 27mm Footfix	Tratamento de fraturas na região de interface entre médiopé e retropé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0720	Placa Locking para Osteotomia Intraossea de Calcânhar 2.4/2.7 x 27mm Footfix	Osteotomia Intraossea de Calcânhar	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0721	Placa Locking para Osteotomia de Cotton e Evans 2.4/2.7 x 27mm Footfix	Osteotomia de Corron e Evans	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0722	Placa Locking para Osteotomia de Bunion 2.4/2.7 X 27mm Footfix	Osteotomia de Bunion	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0723	Placa Locking para Osteotomia de Calcâneo 64 X 52mm, Direita Footfix	Osteotomia de Calcâneo	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0724	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4 / 2.7 x 42mm, Neutra, Direita Footfix	Realiza fusão no antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0725	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 42mm, Neutra, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0726	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 42mm, 5°, Direita Footfix			
	PA.01.06.0727	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 42mm, 5°, Esquerda Footfix			





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0728	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 42mm, 10°, Direita Footfix	Realiza fusão no antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0729	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 42mm, 10°, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0730	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 52mm, Neutra, Direita Footfix			
	PA.01.06.0731	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 52mm, Neutra, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0732	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 52mm, 5°, Direita Footfix			
	PA.01.06.0733	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 52mm, 5°, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0734	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 52mm, 10°, Direita Footfix			
	PA.01.06.0735	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 52mm, 10°, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0736	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 57mm, 5°, Direita Footfix			
	PA.01.06.0737	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 57mm, 5°, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0738	Placa Locking de Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 53mm, Neutra, Direita Footfix			
	PA.01.06.0739	Placa Locking De Fusão Metatarso-Falangeana 2.4/2.7 x 53mm, Neutra, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0740	Placa Locking L de Fusão 2.4/2.7 x 37mm, Direita Footfix	Realizar a fusão das regiões ósseas entre médio pé e antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0741	Placa Locking L de Fusão 2.4/2.7 x 37mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0742	Placa Locking L de Fusão 2.4/2.7 x 44mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0743	Placa Locking L de Fusão 2.4/2.7 x 44mm, Esquerda Footfix			











IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0744	Placa Locking L de Fusão 2.4/2.7 x 62mm, Direita Footfix	Realizar a fusão das regiões ósseas entre médiopé e antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0745	Placa Locking L de Fusão 2.4/2.7 x 62mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0746	Placa Locking para Fratura Tarsometatarsal Reto 2.4/2.7mm Footfix	Tratamento de fratura Tarsometatarsal	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0747	Placa Locking para Fratura Tarsometatarsal Curva 2.4/2.7mm Footfix	Tratamento de fratura Tarsometatarsal	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0748	Placa Locking T de Fusão Tarsometatarsica 2.4/2.7 x 39mm Footfix	Realizar a fusão das regiões ósseas entre médiopé e antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0749	Placa Locking T de Fusão Tarsometatarsica 2.4/2.7 x 48mm Footfix			
	PA.01.06.0750	Placa Locking T de Fusão Tarsometatarsica Angulada 2.4/2.7 x 43mm Footfix	Realizar a fusão das regiões ósseas entre médiopé e antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0751	Placa Locking T de Fusão 2.4/2.7 x 35mm Footfix	Realizar a fusão das regiões ósseas entre médiopé e antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0752	Placa Locking T de Fusão 2.4/2.7 x 42mm Footfix			
	PA.01.06.0753	Placa Locking T de Fusão 2.4/2.7 x 60mm Footfix			
	PA.01.06.0754	Placa Locking T de Fusão 2.4/2.7 x 92mm Footfix			
	PA.01.06.0755	Placa Locking Trevo de Fusão 2.4/2.7 x 38mm Footfix	Realizar a fusão das regiões ósseas entre médiopé e antepé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0756	Placa Locking Trevo de Fusão 2.4/2.7 x 45mm Footfix			
	PA.01.06.0757	Placa Locking Trevo de Fusão 2.4/2.7 x 64mm Footfix			
	PA.01.06.0758	Placa Locking X 2.4/2.7 x 23,5mm Footfix	Tratamento de fraturas na região de interface entre médiopé e retropé	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0759	Placa Locking X 2.4/2.7 x 27mm Footfix			
	PA.01.06.0760	Placa Locking X 2.4/2.7 x 32mm Footfix			
	PA.01.06.0761	Placa Locking X 2.4/2.7 x 36mm Footfix			
	PA.01.06.0762	Placa Locking para Abertura de Cunha 2.4/2.7 x 32mm / Sem Espaçamento Footfix	Tratamento de fraturas em cunha, ou deformidades localizadas nas falanges	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0763	Placa Locking para Abertura de Cunha 2.4/2.7 x 32mm / Com Espaçamento 3mm Footfix			





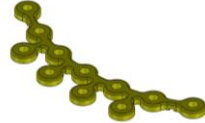
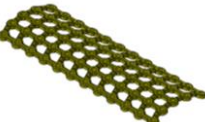


IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0764	Placa Locking para Abertura de Cunha 2.4/2.7 x 32mm / Com Espaçamento 4mm Footfix	Tratamento de fraturas em cunha, ou deformidades localizadas nas falanges	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0765	Placa Locking para Abertura de Cunha 2.4/2.7 x 32mm / Com Espaçamento 5mm Footfix			
	PA.01.06.0766	Placa Locking para Abertura de Cunha 2.4/2.7 x 32mm / Com Espaçamento 6mm Footfix			
	PA.01.06.0767	Placa Locking para Abertura de Cunha 2.4/2.7 x 32mm / Com Espaçamento 7mm Footfix			
	PA.01.06.0768	Placa Locking Cubóide 2.4/2.7mm Direita Footfix	Tratamento de fraturas realizadas no osso cubóide	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0769	Placa Locking Cubóide 2.4/2.7mm Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0770	Placa Locking Navicular 2.4/2.7mm Footfix	Tratamento de fraturas realizadas no osso navicular	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0771	Placa Locking de Bloqueio em Malha 2.4/2.7mm Footfix	Tratamento de fraturas realizadas no osso cubóide, navicular, talus e calcâneo	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0772	Placa Locking de Calcâneo 64 X 52mm, Direita Footfix	Tratamento de fraturas realizadas no calcâneo	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0773	Placa Locking de Calcâneo 64 X 52mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0774	Placa Locking de Calcâneo 69 X 34mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0775	Placa Locking de Calcâneo 69 X 34mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0776	Placa Locking de Calcâneo 76 X 34mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0777	Placa Locking de Calcâneo 76 X 34mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0778	Placa Locking de Calcâneo 81 X 54mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0779	Placa Locking de Calcâneo 81 X 54mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0780	Placa Posterior de Calcaneo 64 x 52mm, Direita Footfix	Tratamento de fraturas posteriores de Calcâneo	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0781	Placa Posterior de Calcaneo 64 x 52mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0782	Placa Posterior de Calcaneo 69 x 34.2mm, Direita Footfix			







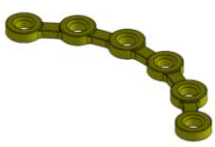


IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0783	Placa Posterior de Calcâneo 69 x 34.2mm, Esquerda Footfix	Tratamento de fraturas posteriores de Calcâneo	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0784	Placa Posterior de Calcâneo 76 x 34.2mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0785	Placa Posterior De Calcâneo 76 x 34.2mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0786	Placa Posterior De Calcâneo 80 x 54mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0787	Placa Posterior De Calcâneo 80 x 54mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0788	Placa Locking Simples de Calcâneo 64 x 52mm, Direita Footfix	Tratamento de fraturas de Calcâneo	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0789	Placa Locking Simples de Calcâneo 64 x 52mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0790	Placa Locking Simples de Calcâneo 69 x 34mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0791	Placa Locking Simples de Calcâneo 69 x 34mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0792	Placa Locking Simples de Calcâneo 76 x 34mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0793	Placa Locking Simples de Calcâneo 76 x 34mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0794	Placa Locking Simples de Calcâneo 81 x 54mm, Direita Footfix			
	PA.01.06.0795	Placa Locking Simples de Calcâneo 81 x 54mm, Esquerda Footfix			
	PA.01.06.0796	Placa Locking Talus Footfix	Tratamento de fraturas realizadas no talus	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0797	Placa Locking Condilar 2,4/2,7mm	Tratamento de fraturas realizadas na base ou no colo das falanges proximais	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0798	Placa Locking de Adaptação em T 3 Furos 2,4/2,7mm	Tratamento de fraturas realizadas na base metacarpal	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela








IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0799	Placa Locking de Adaptação em Y 2 Furos 2,4/2,7mm Footfix	Tratamento de fraturas realizadas na diáfise das falanges proximais ou mediais	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0800	Placa Locking de Adaptação em Y 2,4/2,7mm	Tratamento de fraturas realizadas na diáfise das falanges proximais ou mediais	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0801	Placa Locking para Correção de Rotação 4 Furos 1.5/2.0mm	Tratamento de rotações realizadas nas falanges	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0802	Placa Locking para Correção de Rotação 4 Furos 2.0/2.4mm			
	PA.01.06.0803	Placa Locking para Correção de Rotação 4 Furos 2.4/2.7mm			
	PA.01.06.0804	Placa Locking para Correção de Rotação 5 Furos 1.5/2.0mm	Tratamento de rotações realizadas nas falanges	Titânio Puro Grau 2 F67	Amarela
	PA.01.06.0805	Placa Locking para Correção de Rotação 5 Furos 2.0/2.4mm			
	PA.01.06.0806	Placa Locking para Correção de Rotação 5 Furos 2.4/2.7mm			
	PA.01.06.0078	Parafuso Locking Ø 1.5 X 6mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas nas falanges distais, mediais, unicondilares e diafisárias	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0079	Parafuso Locking Ø 1.5 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0080	Parafuso Locking Ø 1.5 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0081	Parafuso Locking Ø 1.5 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0082	Parafuso Locking Ø 1.5 X 10mm - Torx			
	PA.01.06.0083	Parafuso Locking Ø 1.5 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0084	Parafuso Locking Ø 1.5 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0085	Parafuso Locking Ø 1.5 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0086	Parafuso Locking Ø 1.5 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0087	Parafuso Locking Ø 1.5 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0088	Parafuso Locking Ø 1.5 X 18mm - Torx			







IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0089	Parafuso Locking Ø 1.5 X 20mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas nas falanges distais, mediais, unicondilares e diafisárias	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0090	Parafuso Locking Ø 1.5 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0091	Parafuso Locking Ø 1.5 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0092	Parafuso Locking Ø 1.5 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0093	Parafuso Locking Ø 1.5 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0094	Parafuso Locking Ø 1.5 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0095	Parafuso Locking Ø 1.5 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0096	Parafuso Locking Ø 1.5 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0097	Parafuso Locking Ø 1.5 X 36mm - Torx			
	PA.01.06.0098	Parafuso Locking Ø 1.5 X 38mm - Torx			
	PA.01.06.0099	Parafuso Locking Ø 1.5 X 40mm - Torx			
	PA.01.06.0100	Parafuso Locking Ø 1.5 X 42mm - Torx			
	PA.01.06.0101	Parafuso Locking Ø 1.5 X 44mm - Torx			
	PA.01.06.0102	Parafuso Locking Ø 1.5 X 46mm - Torx			
	PA.01.06.0103	Parafuso Locking Ø 1.5 X 48mm - Torx			
	PA.01.06.0104	Parafuso Locking Ø 1.5 X 50mm - Torx			
	PA.01.06.0105	Parafuso Locking Ø 1.5 X 52mm - Torx			
	PA.01.06.0106	Parafuso Locking Ø 1.5 X 54mm - Torx			
	PA.01.06.0107	Parafuso Locking Ø 1.5 X 56mm - Torx			
PA.01.06.0108	Parafuso Locking Ø 1.5 X 58mm - Torx				
PA.01.06.0109	Parafuso Locking Ø 1.5 X 60mm - Torx				
	PA.01.06.0110	Parafuso Locking Ø 2.0 X 6mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas na diáfise metacarpal	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0111	Parafuso Locking Ø 2.0 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0112	Parafuso Locking Ø 2.0 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0113	Parafuso Locking Ø 2.0 X 9mm - Torx			




IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0114	Parafuso Locking Ø 2.0 X 10mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas na diáfise metacarpal	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0115	Parafuso Locking Ø 2.0 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0116	Parafuso Locking Ø 2.0 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0117	Parafuso Locking Ø 2.0 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0118	Parafuso Locking Ø 2.0 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0119	Parafuso Locking Ø 2.0 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0120	Parafuso Locking Ø 2.0 X 18mm - Torx			
	PA.01.06.0121	Parafuso Locking Ø 2.0 X 20mm - Torx			
	PA.01.06.0122	Parafuso Locking Ø 2.0 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0123	Parafuso Locking Ø 2.0 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0124	Parafuso Locking Ø 2.0 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0125	Parafuso Locking Ø 2.0 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0126	Parafuso Locking Ø 2.0 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0127	Parafuso Locking Ø 2.0 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0128	Parafuso Locking Ø 2.0 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0129	Parafuso Locking Ø 2.0 X 36mm - Torx			
	PA.01.06.0130	Parafuso Locking Ø 2.0 X 38mm - Torx			
	PA.01.06.0131	Parafuso Locking Ø 2.0 X 40mm - Torx			
	PA.01.06.0132	Parafuso Locking Ø 2.0 X 42mm - Torx			
	PA.01.06.0133	Parafuso Locking Ø 2.0 X 44mm - Torx			
PA.01.06.0134	Parafuso Locking Ø 2.0 X 46mm - Torx				
PA.01.06.0135	Parafuso Locking Ø 2.0 X 48mm - Torx				
PA.01.06.0136	Parafuso Locking Ø 2.0 X 50mm - Torx				
PA.01.06.0137	Parafuso Locking Ø 2.0 X 52mm - Torx				
PA.01.06.0138	Parafuso Locking Ø 2.0 X 54mm - Torx				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0139	Parafuso Locking Ø 2.0 X 56mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas na diáfise metacarpal	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0140	Parafuso Locking Ø 2.0 X 58mm - Torx			
	PA.01.06.0141	Parafuso Locking Ø 2.0 X 60mm - Torx			
	PA.01.06.0142	Parafuso Locking Ø 2,4 X 6mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no Metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0143	Parafuso Locking Ø 2,4 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0144	Parafuso Locking Ø 2,4 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0145	Parafuso Locking Ø 2,4 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0146	Parafuso Locking Ø 2,4 X 10mm - Torx			
	PA.01.06.0147	Parafuso Locking Ø 2,4 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0148	Parafuso Locking Ø 2,4 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0149	Parafuso Locking Ø 2,4 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0150	Parafuso Locking Ø 2,4 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0151	Parafuso Locking Ø 2,4 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0152	Parafuso Locking Ø 2,4 X 18mm - Torx			
	PA.01.06.0153	Parafuso Locking Ø 2,4 X 20mm - Torx			
	PA.01.06.0154	Parafuso Locking Ø 2,4 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0155	Parafuso Locking Ø 2,4 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0156	Parafuso Locking Ø 2,4 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0157	Parafuso Locking Ø 2,4 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0158	Parafuso Locking Ø 2,4 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0159	Parafuso Locking Ø 2,4 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0160	Parafuso Locking Ø 2,4 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0161	Parafuso Locking Ø 2,4 X 36mm - Torx			
PA.01.06.0162	Parafuso Locking Ø 2,4 X 38mm - Torx				
PA.01.06.0163	Parafuso Locking Ø 2,4 X 40mm - Torx				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0164	Parafuso Locking Ø 2,4 X 42mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0165	Parafuso Locking Ø 2,4 X 44mm - Torx			
	PA.01.06.0166	Parafuso Locking Ø 2,4 X 46mm - Torx			
	PA.01.06.0167	Parafuso Locking Ø 2,4 X 48mm - Torx			
	PA.01.06.0168	Parafuso Locking Ø 2,4 X 50mm - Torx			
	PA.01.06.0169	Parafuso Locking Ø 2,4 X 52mm - Torx			
	PA.01.06.0170	Parafuso Locking Ø 2,4 X 54mm - Torx			
	PA.01.06.0171	Parafuso Locking Ø 2,4 X 56mm - Torx			
	PA.01.06.0172	Parafuso Locking Ø 2,4 X 58mm - Torx			
	PA.01.06.0173	Parafuso Locking Ø 2,4 X 60mm - Torx			
	PA.01.06.0174	Parafuso Locking Ø 2.7 X 6mm – Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0175	Parafuso Locking Ø 2.7 X 7mm – Torx			
	PA.01.06.0176	Parafuso Locking Ø 2.7 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0177	Parafuso Locking Ø 2.7 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0178	Parafuso Locking Ø 2.7 X 10mm - Torx			
	PA.01.06.0179	Parafuso Locking Ø 2.7 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0180	Parafuso Locking Ø 2.7 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0181	Parafuso Locking Ø 2.7 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0182	Parafuso Locking Ø 2.7 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0183	Parafuso Locking Ø 2.7 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0184	Parafuso Locking Ø 2.7 X 18mm - Torx			
	PA.01.06.0185	Parafuso Locking Ø 2.7 X 20mm - Torx			
	PA.01.06.0186	Parafuso Locking Ø 2.7 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0187	Parafuso Locking Ø 2.7 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0188	Parafuso Locking Ø 2.7 X 26mm - Torx			





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0189	Parafuso Locking Ø 2.7 X 28mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0190	Parafuso Locking Ø 2.7 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0191	Parafuso Locking Ø 2.7 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0192	Parafuso Locking Ø 2.7 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0193	Parafuso Locking Ø 2.7 X 36mm - Torx			
	PA.01.06.0194	Parafuso Locking Ø 2.7 X 38mm - Torx			
	PA.01.06.0195	Parafuso Locking Ø 2.7 X 40mm - Torx			
	PA.01.06.0196	Parafuso Locking Ø 2.7 X 42mm - Torx			
	PA.01.06.0197	Parafuso Locking Ø 2.7 X 44mm - Torx			
	PA.01.06.0198	Parafuso Locking Ø 2.7 X 46mm - Torx			
	PA.01.06.0199	Parafuso Locking Ø 2.7 X 48mm - Torx			
	PA.01.06.0200	Parafuso Locking Ø 2.7 X 50mm - Torx			
	PA.01.06.0201	Parafuso Locking Ø 2.7 X 52mm - Torx			
	PA.01.06.0202	Parafuso Locking Ø 2.7 X 54mm - Torx			
	PA.01.06.0203	Parafuso Locking Ø 2.7 X 56mm - Torx			
PA.01.06.0204	Parafuso Locking Ø 2.7 X 58mm - Torx				
PA.01.06.0205	Parafuso Locking Ø 2.7 X 60mm - Torx				
	PA.01.06.0206	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 6mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas nas falanges distais, mediais, unicondiliares e diafisárias	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0207	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0208	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0209	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0210	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 10mm - Torx			
	PA.01.06.0211	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0212	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0213	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 13mm - Torx			




IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0214	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 14mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas nas falanges distais, mediais, unicondiliares e diafisárias	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0215	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0216	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 18mm - Torx			
	PA.01.06.0217	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 20mm - Torx			
	PA.01.06.0218	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0219	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0220	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0221	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0222	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0223	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0224	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0225	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 36mm - Torx			
	PA.01.06.0226	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 38mm - Torx			
	PA.01.06.0227	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 40mm - Torx			
	PA.01.06.0228	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 42mm - Torx			
	PA.01.06.0229	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 44mm - Torx			
	PA.01.06.0230	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 46mm - Torx			
	PA.01.06.0231	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 48mm - Torx			
	PA.01.06.0232	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 50mm - Torx			
	PA.01.06.0233	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 52mm - Torx			
PA.01.06.0234	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 54mm - Torx				
PA.01.06.0235	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 56mm - Torx				
PA.01.06.0236	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 58mm - Torx				
PA.01.06.0237	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 60mm - Torx				






IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0238	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 6mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas na diáfise metacarpal	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0239	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0240	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0241	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0242	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 10mm - Torx			
	PA.01.06.0243	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0244	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0245	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0246	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0247	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0248	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 18mm - Torx			
	PA.01.06.0249	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 20mm - Torx			
	PA.01.06.0250	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0251	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0252	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0253	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0254	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0255	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0256	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0257	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 36mm - Torx			
PA.01.06.0258	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 38mm - Torx				
PA.01.06.0259	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 40mm - Torx				
PA.01.06.0260	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 42mm - Torx				
PA.01.06.0261	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 44mm - Torx				
PA.01.06.0262	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 46mm - Torx				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0263	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 48mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas na diáfise metacarpal	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0264	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 50mm - Torx			
	PA.01.06.0265	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 52mm - Torx			
	PA.01.06.0266	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 54mm - Torx			
	PA.01.06.0267	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 56mm - Torx			
	PA.01.06.0268	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 58mm - Torx			
	PA.01.06.0269	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 60mm - Torx			
	PA.01.06.0270	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 6mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0271	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0272	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0273	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0274	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 10mm - Torx			
	PA.01.06.0275	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0276	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0277	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0278	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0279	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0280	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 18mm - Torx			
	PA.01.06.0281	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 20mm - Torx			
	PA.01.06.0282	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0283	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0284	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0285	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0286	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 30mm - Torx			
PA.01.06.0287	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 32mm - Torx				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0288	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 34mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0289	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 36mm - Torx			
	PA.01.06.0290	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 38mm - Torx			
	PA.01.06.0291	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 40mm - Torx			
	PA.01.06.0292	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 42mm - Torx			
	PA.01.06.0293	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 44mm - Torx			
	PA.01.06.0294	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 46mm - Torx			
	PA.01.06.0295	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 48mm - Torx			
	PA.01.06.0296	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 50mm - Torx			
	PA.01.06.0297	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 52mm - Torx			
	PA.01.06.0298	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 54mm - Torx			
	PA.01.06.0299	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 56mm - Torx			
	PA.01.06.0300	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 58mm - Torx			
	PA.01.06.0301	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 60mm - Torx			
	PA.01.06.0302	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 6mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0303	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0304	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0305	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0306	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 10mm - Torx			
	PA.01.06.0307	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 11mm - Torx			
	PA.01.06.0308	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0309	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0310	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0311	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0312	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 18mm - Torx			





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0313	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 20mm - Torx	Fixação das placas ao osso e no tratamento de fraturas no metacarpo ou carpo	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0314	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0315	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0316	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0317	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0318	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0319	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0320	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0321	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 36mm - Torx			
	PA.01.06.0322	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 38mm - Torx			
	PA.01.06.0323	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 40mm - Torx			
	PA.01.06.0324	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 42mm - Torx			
	PA.01.06.0325	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 44mm - Torx			
	PA.01.06.0326	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 46mm - Torx			
	PA.01.06.0327	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 48mm - Torx			
	PA.01.06.0328	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 50mm - Torx			
	PA.01.06.0329	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 52mm - Torx			
	PA.01.06.0330	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 54mm - Torx			
	PA.01.06.0331	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 56mm - Torx			
PA.01.06.0332	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 58mm - Torx				
PA.01.06.0333	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 60mm - Torx				
	PA.01.06.0334	Pino Liso Ø 2,0 X 6mm - Torx	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0335	Pino Liso Ø 2,0 X 7mm - Torx			
	PA.01.06.0336	Pino Liso Ø 2,0 X 8mm - Torx			
	PA.01.06.0337	Pino Liso Ø 2,0 X 9mm - Torx			
	PA.01.06.0338	Pino Liso Ø 2,0 X 10mm - Torx			




IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0339	Pino Liso Ø 2,0 X 11mm - Torx	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0340	Pino Liso Ø 2,0 X 12mm - Torx			
	PA.01.06.0341	Pino Liso Ø 2,0 X 13mm - Torx			
	PA.01.06.0342	Pino Liso Ø 2,0 X 14mm - Torx			
	PA.01.06.0343	Pino Liso Ø 2,0 X 16mm - Torx			
	PA.01.06.0344	Pino Liso Ø 2,0 X 18mm - Torx			
	PA.01.06.0345	Pino Liso Ø 2,0 X 20mm - Torx			
	PA.01.06.0346	Pino Liso Ø 2,0 X 22mm - Torx			
	PA.01.06.0347	Pino Liso Ø 2,0 X 24mm - Torx			
	PA.01.06.0348	Pino Liso Ø 2,0 X 26mm - Torx			
	PA.01.06.0349	Pino Liso Ø 2,0 X 28mm - Torx			
	PA.01.06.0350	Pino Liso Ø 2,0 X 30mm - Torx			
	PA.01.06.0351	Pino Liso Ø 2,0 X 32mm - Torx			
	PA.01.06.0352	Pino Liso Ø 2,0 X 34mm - Torx			
	PA.01.06.0353	Pino Liso Ø 2,0 X 36mm - Torx			
	PA.01.06.0354	Pino Liso Ø 2,0 X 38mm - Torx			
	PA.01.06.0355	Pino Liso Ø 2,0 X 40mm - Torx			
	PA.01.06.0356	Pino Liso Ø 2,0 X 42mm - Torx			
	PA.01.06.0357	Pino Liso Ø 2,0 X 44mm - Torx			
	PA.01.06.0358	Pino Liso Ø 2,0 X 46mm - Torx			
PA.01.06.0359	Pino Liso Ø 2,0 X 48mm - Torx				
PA.01.06.0360	Pino Liso Ø 2,0 X 50mm - Torx				
PA.01.06.0361	Pino Liso Ø 2,0 X 52mm - Torx				
PA.01.06.0362	Pino Liso Ø 2,0 X 54mm - Torx				
PA.01.06.0363	Pino Liso Ø 2,0 X 56mm - Torx				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0364	Pino Liso Ø 2,0 X 58mm - Torx	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0365	Pino Liso Ø 2,0 X 60mm - Torx			
	PA.01.06.0366	Pino Liso Ø 2.4 X 6mm – Torx	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0367	Pino Liso Ø 2.4 X 7mm – Torx			
	PA.01.06.0368	Pino Liso Ø 2.4 X 8mm – Torx			
	PA.01.06.0369	Pino Liso Ø 2.4 X 9mm – Torx			
	PA.01.06.0370	Pino Liso Ø 2.4 X 10mm – Torx			
	PA.01.06.0371	Pino Liso Ø 2.4 X 11mm – Torx			
	PA.01.06.0372	Pino Liso Ø 2.4 X 12mm – Torx			
	PA.01.06.0373	Pino Liso Ø 2.4 X 13mm – Torx			
	PA.01.06.0374	Pino Liso Ø 2.4 X 14mm – Torx			
	PA.01.06.0375	Pino Liso Ø 2.4 X 16mm – Torx			
	PA.01.06.0376	Pino Liso Ø 2.4 X 18mm – Torx			
	PA.01.06.0377	Pino Liso Ø 2.4 X 20mm – Torx			
	PA.01.06.0378	Pino Liso Ø 2.4 X 22mm – Torx			
	PA.01.06.0379	Pino Liso Ø 2.4 X 24mm – Torx			
	PA.01.06.0380	Pino Liso Ø 2.4 X 26mm – Torx			
	PA.01.06.0381	Pino Liso Ø 2.4 X 28mm – Torx			
	PA.01.06.0382	Pino Liso Ø 2.4 X 30mm – Torx			
	PA.01.06.0383	Pino Liso Ø 2.4 X 32mm – Torx			
	PA.01.06.0384	Pino Liso Ø 2.4 X 34mm – Torx			
	PA.01.06.0385	Pino Liso Ø 2.4 X 36mm – Torx			
PA.01.06.0386	Pino Liso Ø 2.4 X 38mm – Torx				
PA.01.06.0387	Pino Liso Ø 2.4 X 40mm – Torx				
PA.01.06.0388	Pino Liso Ø 2.4 X 42mm – Torx				
PA.01.06.0389	Pino Liso Ø 2.4 X 44mm – Torx				







IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0390	Pino Liso Ø 2.4 X 46mm – Torx	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0391	Pino Liso Ø 2.4 X 48mm – Torx			
	PA.01.06.0392	Pino Liso Ø 2.4 X 50mm – Torx			
	PA.01.06.0393	Pino Liso Ø 2.4 X 52mm – Torx			
	PA.01.06.0394	Pino Liso Ø 2.4 X 54mm – Torx			
	PA.01.06.0395	Pino Liso Ø 2.4 X 56mm – Torx			
	PA.01.06.0396	Pino Liso Ø 2.4 X 58mm – Torx			
	PA.01.06.0397	Pino Liso Ø 2.4 X 60mm – Torx			
	PA.01.06.0398	Parafuso Locking Ø 1.5 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0399	Parafuso Locking Ø 1.5 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0400	Parafuso Locking Ø 1.5 X 8mm – Hex			
	PA.01.06.0401	Parafuso Locking Ø 1.5 X 9mm – Hex			
	PA.01.06.0402	Parafuso Locking Ø 1.5 X 10mm – Hex			
	PA.01.06.0403	Parafuso Locking Ø 1.5 X 11mm – Hex			
	PA.01.06.0404	Parafuso Locking Ø 1.5 X 12mm – Hex			
	PA.01.06.0405	Parafuso Locking Ø 1.5 X 13mm – Hex			
	PA.01.06.0406	Parafuso Locking Ø 1.5 X 14mm – Hex			
	PA.01.06.0407	Parafuso Locking Ø 1.5 X 16mm – Hex			
	PA.01.06.0408	Parafuso Locking Ø 1.5 X 18mm – Hex			
	PA.01.06.0409	Parafuso Locking Ø 1.5 X 20mm – Hex			
	PA.01.06.0410	Parafuso Locking Ø 1.5 X 22mm – Hex			
	PA.01.06.0411	Parafuso Locking Ø 1.5 X 24mm – Hex			
	PA.01.06.0412	Parafuso Locking Ø 1.5 X 26mm – Hex			
	PA.01.06.0413	Parafuso Locking Ø 1.5 X 28mm – Hex			
PA.01.06.0414	Parafuso Locking Ø 1.5 X 30mm – Hex				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0415	Parafuso Locking Ø 1.5 X 32mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0416	Parafuso Locking Ø 1.5 X 34mm - Hex			
	PA.01.06.0417	Parafuso Locking Ø 1.5 X 36mm - Hex			
	PA.01.06.0418	Parafuso Locking Ø 1.5 X 38mm - Hex			
	PA.01.06.0419	Parafuso Locking Ø 1.5 X 40mm - Hex			
	PA.01.06.0420	Parafuso Locking Ø 1.5 X 42mm - Hex			
	PA.01.06.0421	Parafuso Locking Ø 1.5 X 44mm - Hex			
	PA.01.06.0422	Parafuso Locking Ø 1.5 X 46mm - Hex			
	PA.01.06.0423	Parafuso Locking Ø 1.5 X 48mm - Hex			
	PA.01.06.0424	Parafuso Locking Ø 1.5 X 50mm - Hex			
	PA.01.06.0425	Parafuso Locking Ø 1.5 X 52mm - Hex			
	PA.01.06.0426	Parafuso Locking Ø 1.5 X 54mm - Hex			
	PA.01.06.0427	Parafuso Locking Ø 1.5 X 56mm - Hex			
	PA.01.06.0428	Parafuso Locking Ø 1.5 X 58mm - Hex			
PA.01.06.0429	Parafuso Locking Ø 1.5 X 60mm - Hex				
	PA.01.06.0430	Parafuso Locking Ø2.0x 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0431	Parafuso Locking Ø 2.0x 7mm - Hex			
	PA.01.06.0432	Parafuso Locking Ø 2.0x 8mm - Hex			
	PA.01.06.0433	Parafuso Locking Ø 2.0x 9mm - Hex			
	PA.01.06.0434	Parafuso Locking Ø 2.0x 10mm - Hex			
	PA.01.06.0435	Parafuso Locking Ø 2.0x 11mm - Hex			
	PA.01.06.0436	Parafuso Locking Ø 2.0x 12mm - Hex			
	PA.01.06.0437	Parafuso Locking Ø 2.0x 13mm - Hex			
	PA.01.06.0438	Parafuso Locking Ø 2.0x 14mm - Hex			
	PA.01.06.0439	Parafuso Locking Ø 2.0x 16mm - Hex			





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0440	Parafuso Locking Ø 2.0x 18mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0441	Parafuso Locking Ø 2.0x 20mm - Hex			
	PA.01.06.0442	Parafuso Locking Ø 2.0x 22mm - Hex			
	PA.01.06.0443	Parafuso Locking Ø 2.0x 24mm - Hex			
	PA.01.06.0444	Parafuso Locking Ø 2.0x 26mm - Hex			
	PA.01.06.0445	Parafuso Locking Ø 2.0x 28mm - Hex			
	PA.01.06.0446	Parafuso Locking Ø 2.0x 30mm - Hex			
	PA.01.06.0447	Parafuso Locking Ø 2.0x 32mm - Hex			
	PA.01.06.0448	Parafuso Locking Ø 2.0x 34mm - Hex			
	PA.01.06.0449	Parafuso Locking Ø 2.0x 36mm - Hex			
	PA.01.06.0450	Parafuso Locking Ø 2.0x 38mm - Hex			
	PA.01.06.0451	Parafuso Locking Ø 2.0x 40mm - Hex			
	PA.01.06.0452	Parafuso Locking Ø 2.0x 42mm - Hex			
	PA.01.06.0453	Parafuso Locking Ø 2.0x 44mm - Hex			
	PA.01.06.0454	Parafuso Locking Ø 2.0x 46mm - Hex			
	PA.01.06.0455	Parafuso Locking Ø 2.0x 48mm - Hex			
	PA.01.06.0456	Parafuso Locking Ø 2.0x 50mm - Hex			
	PA.01.06.0457	Parafuso Locking Ø 2.0x 52mm - Hex			
	PA.01.06.0458	Parafuso Locking Ø 2.0x 54mm - Hex			
	PA.01.06.0459	Parafuso Locking Ø 2.0x 56mm - Hex			
PA.01.06.0460	Parafuso Locking Ø 2.0x 58mm - Hex				
PA.01.06.0461	Parafuso Locking Ø 2.0x 60mm - Hex				
	PA.01.06.0462	Parafuso Locking Ø 2.4 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0463	Parafuso Locking Ø 2.4 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0464	Parafuso Locking Ø 2.4 X 8mm - Hex			




IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0465	Parafuso Locking Ø 2.4 X 9mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0466	Parafuso Locking Ø 2.4 X 10mm - Hex			
	PA.01.06.0467	Parafuso Locking Ø 2.4 X 11mm - Hex			
	PA.01.06.0468	Parafuso Locking Ø 2.4 X 12mm - Hex			
	PA.01.06.0469	Parafuso Locking Ø 2.4 X 13mm - Hex			
	PA.01.06.0470	Parafuso Locking Ø 2.4 X 14mm - Hex			
	PA.01.06.0471	Parafuso Locking Ø 2.4 X 16mm - Hex			
	PA.01.06.0472	Parafuso Locking Ø 2.4 X 18mm - Hex			
	PA.01.06.0473	Parafuso Locking Ø 2.4 X 20mm - Hex			
	PA.01.06.0474	Parafuso Locking Ø 2.4 X 22mm - Hex			
	PA.01.06.0475	Parafuso Locking Ø 2.4 X 24mm - Hex			
	PA.01.06.0476	Parafuso Locking Ø 2.4 X 26mm - Hex			
	PA.01.06.0477	Parafuso Locking Ø 2.4 X 28mm - Hex			
	PA.01.06.0478	Parafuso Locking Ø 2.4 X 30mm - Hex			
	PA.01.06.0479	Parafuso Locking Ø 2.4 X 32mm - Hex			
	PA.01.06.0480	Parafuso Locking Ø 2.4 X 34mm - Hex			
	PA.01.06.0481	Parafuso Locking Ø 2.4 X 36mm - Hex			
	PA.01.06.0482	Parafuso Locking Ø 2.4 X 38mm - Hex			
	PA.01.06.0483	Parafuso Locking Ø 2.4 X 40mm - Hex			
	PA.01.06.0484	Parafuso Locking Ø 2.4 X 42mm - Hex			
PA.01.06.0485	Parafuso Locking Ø 2.4 X 44mm - Hex				
PA.01.06.0486	Parafuso Locking Ø 2.4 X 46mm - Hex				
PA.01.06.0487	Parafuso Locking Ø 2.4 X 48mm - Hex				
PA.01.06.0488	Parafuso Locking Ø 2.4 X 50mm - Hex				
PA.01.06.0489	Parafuso Locking Ø 2.4 X 52mm - Hex				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0490	Parafuso Locking Ø 2.4 X 54mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0491	Parafuso Locking Ø 2.4 X 56mm - Hex			
	PA.01.06.0492	Parafuso Locking Ø 2.4 X 58mm - Hex			
	PA.01.06.0493	Parafuso Locking Ø 2.4 X 60mm - Hex			
	PA.01.06.0494	Parafuso Locking Ø 2.7 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0495	Parafuso Locking Ø 2.7 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0496	Parafuso Locking Ø 2.7 X 8mm - Hex			
	PA.01.06.0497	Parafuso Locking Ø 2.7 X 9mm - Hex			
	PA.01.06.0498	Parafuso Locking Ø 2.7 X 10mm - Hex			
	PA.01.06.0499	Parafuso Locking Ø 2.7 X 11mm - Hex			
	PA.01.06.0500	Parafuso Locking Ø 2.7 X 12mm - Hex			
	PA.01.06.0501	Parafuso Locking Ø 2.7 X 13mm - Hex			
	PA.01.06.0502	Parafuso Locking Ø 2.7 X 14mm - Hex			
	PA.01.06.0503	Parafuso Locking Ø 2.7 X 16mm - Hex			
	PA.01.06.0504	Parafuso Locking Ø 2.7 X 18mm - Hex			
	PA.01.06.0505	Parafuso Locking Ø 2.7 X 20mm - Hex			
	PA.01.06.0506	Parafuso Locking Ø 2.7 X 22mm - Hex			
	PA.01.06.0507	Parafuso Locking Ø 2.7 X 24mm - Hex			
	PA.01.06.0508	Parafuso Locking Ø 2.7 X 26mm - Hex			
	PA.01.06.0509	Parafuso Locking Ø 2.7 X 28mm - Hex			
	PA.01.06.0510	Parafuso Locking Ø 2.7 X 30mm - Hex			
PA.01.06.0511	Parafuso Locking Ø 2.7 X 32mm - Hex				
PA.01.06.0512	Parafuso Locking Ø 2.7 X 34mm - Hex				
PA.01.06.0513	Parafuso Locking Ø 2.7 X 36mm - Hex				
PA.01.06.0514	Parafuso Locking Ø 2.7 X 38mm - Hex				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0515	Parafuso Locking Ø 2.7 X 40mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0516	Parafuso Locking Ø 2.7 X 42mm - Hex			
	PA.01.06.0517	Parafuso Locking Ø 2.7 X 44mm - Hex			
	PA.01.06.0518	Parafuso Locking Ø 2.7 X 46mm - Hex			
	PA.01.06.0519	Parafuso Locking Ø 2.7 X 48mm - Hex			
	PA.01.06.0520	Parafuso Locking Ø 2.7 X 50mm - Hex			
	PA.01.06.0521	Parafuso Locking Ø 2.7 X 52mm - Hex			
	PA.01.06.0522	Parafuso Locking Ø 2.7 X 54mm - Hex			
	PA.01.06.0523	Parafuso Locking Ø 2.7 X 56mm - Hex			
	PA.01.06.0524	Parafuso Locking Ø 2.7 X 58mm - Hex			
	PA.01.06.0525	Parafuso Locking Ø 2.7 X 60mm - Hex			
	PA.01.06.0526	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0527	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0528	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 8mm - Hex			
	PA.01.06.0529	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 9mm - Hex			
	PA.01.06.0530	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 10mm - Hex			
	PA.01.06.0531	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 11mm - Hex			
	PA.01.06.0532	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 12mm - Hex			
	PA.01.06.0533	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 13mm - Hex			
	PA.01.06.0534	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 14mm - Hex			
	PA.01.06.0535	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 16mm - Hex			
	PA.01.06.0536	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 18mm - Hex			
	PA.01.06.0537	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 20mm - Hex			
	PA.01.06.0538	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 22mm - Hex			
	PA.01.06.0539	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 24mm - Hex			







IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0540	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 26mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Azul
	PA.01.06.0541	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 28mm - Hex			
	PA.01.06.0542	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 30mm - Hex			
	PA.01.06.0543	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 32mm - Hex			
	PA.01.06.0544	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 34mm - Hex			
	PA.01.06.0545	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 36mm - Hex			
	PA.01.06.0546	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 38mm - Hex			
	PA.01.06.0547	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 40mm - Hex			
	PA.01.06.0548	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 42mm - Hex			
	PA.01.06.0549	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 44mm - Hex			
	PA.01.06.0550	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 46mm - Hex			
	PA.01.06.0551	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 48mm - Hex			
	PA.01.06.0552	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 50mm - Hex			
	PA.01.06.0553	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 52mm - Hex			
	PA.01.06.0554	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 54mm - Hex			
	PA.01.06.0555	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 56mm - Hex			
PA.01.06.0556	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 58mm - Hex				
PA.01.06.0557	Parafuso Cortical Ø 1,5 X 60mm - Hex				
	PA.01.06.0558	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0559	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0560	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 8mm - Hex			
	PA.01.06.0561	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 9mm - Hex			
	PA.01.06.0562	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 10mm - Hex			
	PA.01.06.0563	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 11mm - Hex			
	PA.01.06.0564	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 12mm - Hex			




IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0565	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 13mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0566	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 14mm - Hex			
	PA.01.06.0567	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 16mm - Hex			
	PA.01.06.0568	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 18mm - Hex			
	PA.01.06.0569	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 20mm - Hex			
	PA.01.06.0570	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 22mm - Hex			
	PA.01.06.0571	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 24mm - Hex			
	PA.01.06.0572	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 26mm - Hex			
	PA.01.06.0573	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 28mm - Hex			
	PA.01.06.0574	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 30mm - Hex			
	PA.01.06.0575	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 32mm - Hex			
	PA.01.06.0576	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 34mm - Hex			
	PA.01.06.0577	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 36mm - Hex			
	PA.01.06.0578	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 38mm - Hex			
	PA.01.06.0579	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 40mm - Hex			
	PA.01.06.0580	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 42mm - Hex			
	PA.01.06.0581	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 44mm - Hex			
	PA.01.06.0582	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 46mm - Hex			
	PA.01.06.0583	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 48mm - Hex			
	PA.01.06.0584	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 50mm - Hex			
PA.01.06.0585	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 52mm - Hex				
PA.01.06.0586	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 54mm - Hex				
PA.01.06.0587	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 56mm - Hex				
PA.01.06.0588	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 58mm - Hex				
PA.01.06.0589	Parafuso Cortical Ø 2,0 X 60mm - Hex				




IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0590	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0591	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0592	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 8mm - Hex			
	PA.01.06.0593	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 9mm - Hex			
	PA.01.06.0594	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 10mm - Hex			
	PA.01.06.0595	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 11mm - Hex			
	PA.01.06.0596	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 12mm - Hex			
	PA.01.06.0597	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 13mm - Hex			
	PA.01.06.0598	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 14mm - Hex			
	PA.01.06.0599	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 16mm - Hex			
	PA.01.06.0600	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 18mm - Hex			
	PA.01.06.0601	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 20mm - Hex			
	PA.01.06.0602	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 22mm - Hex			
	PA.01.06.0603	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 24mm - Hex			
	PA.01.06.0604	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 26mm - Hex			
	PA.01.06.0605	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 28mm - Hex			
	PA.01.06.0606	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 30mm - Hex			
	PA.01.06.0607	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 32mm - Hex			
	PA.01.06.0608	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 34mm - Hex			
	PA.01.06.0609	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 36mm - Hex			
PA.01.06.0610	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 38mm - Hex				
PA.01.06.0611	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 40mm - Hex				
PA.01.06.0612	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 42mm - Hex				
PA.01.06.0613	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 44mm - Hex				
PA.01.06.0614	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 46mm - Hex				



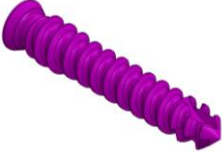

IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0615	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 48mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0616	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 50mm - Hex			
	PA.01.06.0617	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 52mm - Hex			
	PA.01.06.0618	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 54mm - Hex			
	PA.01.06.0619	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 56mm - Hex			
	PA.01.06.0620	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 58mm - Hex			
	PA.01.06.0621	Parafuso Cortical Ø 2,4 X 60mm - Hex			
	PA.01.06.0622	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0623	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0624	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 8mm - Hex			
	PA.01.06.0625	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 9mm - Hex			
	PA.01.06.0626	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 10mm - Hex			
	PA.01.06.0627	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 11mm - Hex			
	PA.01.06.0628	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 12mm - Hex			
	PA.01.06.0629	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 13mm - Hex			
	PA.01.06.0630	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 14mm - Hex			
	PA.01.06.0631	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 16mm - Hex			
	PA.01.06.0632	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 18mm - Hex			
	PA.01.06.0633	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 20mm - Hex			
	PA.01.06.0634	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 22mm - Hex			
	PA.01.06.0635	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 24mm - Hex			
	PA.01.06.0636	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 26mm - Hex			
	PA.01.06.0637	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 28mm - Hex			
	PA.01.06.0638	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 30mm - Hex			
PA.01.06.0639	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 32mm - Hex				





IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0640	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 34mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Verde
	PA.01.06.0641	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 36mm - Hex			
	PA.01.06.0642	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 38mm - Hex			
	PA.01.06.0643	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 40mm - Hex			
	PA.01.06.0644	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 42mm - Hex			
	PA.01.06.0645	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 44mm - Hex			
	PA.01.06.0646	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 46mm - Hex			
	PA.01.06.0647	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 48mm - Hex			
	PA.01.06.0648	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 50mm - Hex			
	PA.01.06.0649	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 52mm - Hex			
	PA.01.06.0650	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 54mm - Hex			
	PA.01.06.0651	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 56mm - Hex			
	PA.01.06.0652	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 58mm - Hex			
	PA.01.06.0653	Parafuso Cortical Ø 2,7 X 60mm - Hex			
	PA.01.06.0654	Pino Liso Ø 2,0 X 6mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0655	Pino Liso Ø 2,0 X 7mm - Hex			
	PA.01.06.0656	Pino Liso Ø 2,0 X 8mm - Hex			
	PA.01.06.0657	Pino Liso Ø 2,0 X 9mm - Hex			
	PA.01.06.0658	Pino Liso Ø 2,0 X 10mm - Hex			
	PA.01.06.0659	Pino Liso Ø 2,0 X 11mm - Hex			
	PA.01.06.0660	Pino Liso Ø 2,0 X 12mm - Hex			
	PA.01.06.0661	Pino Liso Ø 2,0 X 13mm - Hex			
	PA.01.06.0662	Pino Liso Ø 2,0 X 14mm - Hex			
	PA.01.06.0663	Pino Liso Ø 2,0 X 16mm - Hex			
	PA.01.06.0664	Pino Liso Ø 2,0 X 18mm - Hex			
	PA.01.06.0665	Pino Liso Ø 2,0 X 20mm - Hex			






IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0666	Pino Liso Ø 2,0 X 22mm - Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Amarela
	PA.01.06.0667	Pino Liso Ø 2,0 X 24mm - Hex			
	PA.01.06.0668	Pino Liso Ø 2,0 X 26mm - Hex			
	PA.01.06.0669	Pino Liso Ø 2,0 X 28mm - Hex			
	PA.01.06.0670	Pino Liso Ø 2,0 X 30mm - Hex			
	PA.01.06.0671	Pino Liso Ø 2,0 X 32mm - Hex			
	PA.01.06.0672	Pino Liso Ø 2,0 X 34mm - Hex			
	PA.01.06.0673	Pino Liso Ø 2,0 X 36mm - Hex			
	PA.01.06.0674	Pino Liso Ø 2,0 X 38mm - Hex			
	PA.01.06.0675	Pino Liso Ø 2,0 X 40mm - Hex			
	PA.01.06.0676	Pino Liso Ø 2,0 X 42mm - Hex			
	PA.01.06.0677	Pino Liso Ø 2,0 X 44mm - Hex			
	PA.01.06.0678	Pino Liso Ø 2,0 X 46mm - Hex			
	PA.01.06.0679	Pino Liso Ø 2,0 X 48mm - Hex			
	PA.01.06.0680	Pino Liso Ø 2,0 X 50mm - Hex			
	PA.01.06.0681	Pino Liso Ø 2,0 X 52mm - Hex			
	PA.01.06.0682	Pino Liso Ø 2,0 X 54mm - Hex			
PA.01.06.0683	Pino Liso Ø 2,0 X 56mm - Hex				
PA.01.06.0684	Pino Liso Ø 2,0 X 58mm - Hex				
PA.01.06.0685	Pino Liso Ø 2,0 X 60mm - Hex				
	PA.01.06.0686	Pino Liso Ø 2.4 X 6mm – Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0687	Pino Liso Ø 2.4 X 7mm – Hex			
	PA.01.06.0688	Pino Liso Ø 2.4 X 8mm – Hex			
	PA.01.06.0689	Pino Liso Ø 2.4 X 9mm – Hex			
	PA.01.06.0690	Pino Liso Ø 2.4 X 10mm – Hex			
	PA.01.06.0691	Pino Liso Ø 2.4 X 11mm – Hex			
	PA.01.06.0692	Pino Liso Ø 2.4 X 12mm – Hex			



IMAGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	MATERIAL	IONIZADO NA COR
	PA.01.06.0693	Pino Liso Ø 2.4 X 13mm – Hex	Fixação das Placas ao osso	Liga de Titânio Ti-6Al-4V ASTM F136	Lilás
	PA.01.06.0694	Pino Liso Ø 2.4 X 14mm – Hex			
	PA.01.06.0695	Pino Liso Ø 2.4 X 16mm – Hex			
	PA.01.06.0696	Pino Liso Ø 2.4 X 18mm – Hex			
	PA.01.06.0697	Pino Liso Ø 2.4 X 20mm – Hex			
	PA.01.06.0698	Pino Liso Ø 2.4 X 22mm – Hex			
	PA.01.06.0699	Pino Liso Ø 2.4 X 24mm – Hex			
	PA.01.06.0700	Pino Liso Ø 2.4 X 26mm – Hex			
	PA.01.06.0701	Pino Liso Ø 2.4 X 28mm – Hex			
	PA.01.06.0702	Pino Liso Ø 2.4 X 30mm – Hex			
	PA.01.06.0703	Pino Liso Ø 2.4 X 32mm – Hex			
	PA.01.06.0704	Pino Liso Ø 2.4 X 34mm – Hex			
	PA.01.06.0705	Pino Liso Ø 2.4 X 36mm – Hex			
	PA.01.06.0706	Pino Liso Ø 2.4 X 38mm – Hex			
	PA.01.06.0707	Pino Liso Ø 2.4 X 40mm – Hex			
	PA.01.06.0708	Pino Liso Ø 2.4 X 42mm – Hex			
	PA.01.06.0709	Pino Liso Ø 2.4 X 44mm – Hex			
	PA.01.06.0710	Pino Liso Ø 2.4 X 46mm – Hex			
	PA.01.06.0711	Pino Liso Ø 2.4 X 48mm – Hex			
	PA.01.06.0712	Pino Liso Ø 2.4 X 50mm – Hex			
PA.01.06.0713	Pino Liso Ø 2.4 X 52mm – Hex				
PA.01.06.0714	Pino Liso Ø 2.4 X 54mm – Hex				
PA.01.06.0715	Pino Liso Ø 2.4 X 56mm – Hex				
PA.01.06.0716	Pino Liso Ø 2.4 X 58mm – Hex				
PA.01.06.0717	Pino Liso Ø 2.4 X 60mm – Hex				





**Compatibilidade dos Produtos**

As placas do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec são indistintamente compatíveis com todos os parafusos presentes nesse registro.

**Acessórios / Componentes Ancilares**

Os produtos do Sistema de Fixação Rígida – Footfix Traumec não possuem acessórios e nem componentes ancilares.

**Material de apoio do dispositivo médico**

Os produtos do Sistema de Fixação Rígida – Footfix Traumec possuem os seguintes materiais de consumo e/ou apoio:

- ✓ 04 (quatro) unidades de Etiquetas de Rastreabilidade.

As Instruções de Uso estarão disponíveis no site da Traumec <http://www.traumec.com.br>

Para garantir a correlação entre o produto fornecido e a versão da instrução de uso correspondente, a seguinte frase estará presente na rotulagem dos produtos:

Instrução de Uso nº 80455630087 – Instrução de Uso Rev.00 disponível no site: [www.traumec.com.br](http://www.traumec.com.br)

Instruções de uso fornecidas no formato impresso, sem custo adicional, podem ser solicitadas ao SAC.

Serviço de Atendimento ao Cliente - Telefone: +55 (19) 3522-1177

**Características do dispositivo médico**

Os produtos do Sistema de Fixação Rígida – Footfix Traumec se caracterizam por:

- ✓ Sua biocompatibilidade apresenta boa resposta biológica em sua aplicação, desde que utilizado de maneira adequada, sendo os produtos confeccionados em Titânio Puro Grau 2 e Liga de Titânio Ti6Al4V, conforme especificado nas normas ASTM F67 e ASTM F136, respectivamente;
- ✓ Apresentar resistência mecânica para suportar as cargas impostas as regiões de aplicação;
- ✓ Adaptar-se à geometria óssea;
- ✓ Apresentar vantagens dado que se adaptam às preferências individuais e necessidades de cada caso, contendo implantes de diferentes tamanhos, garantindo um melhor resultado e um menor tempo de cirurgia.

**Indicações de uso**

O Sistema de Fixação Rígida – Footfix TRAUMEC é indicado no tratamento de fraturas e patologias dos ossos do médio pé e do ante pé, sendo eles tarso, metatarso e falanges.

- Fraturas dos metatarsos e falanges
- Fraturas do osso do tarso;
- Fraturas em ossos osteopênicos.



Faz-se necessário, portanto, que o produto seja utilizado apenas por médicos cirurgiões ortopedistas que tenham conhecimento das técnicas, bem como formação adequada para realização de procedimentos cirúrgicos que envolvam a colocação de implantes ortopédicos.

**Desempenho Previsto**

O seguinte desempenho é esperado na utilização Sistema de Fixação Rígida – Footfix Traumec:

- Fixação estável da fratura, com restauração precoce da função, primando pelo alinhamento do membro.

**Isenção de Responsabilidade**

A TRAUMEC, como fabricante deste dispositivo, não pratica medicina nem recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em determinado paciente. O cirurgião que realizar qualquer procedimento utilizando material implantável é responsável por definir e utilizar as técnicas apropriadas para implantação do produto no paciente.

A TRAUMEC não é responsável pela escolha da técnica cirúrgica apropriada a ser usada em cada paciente. As Técnicas Cirúrgicas dependem da técnica adotada pelo médico cirurgião, cabendo a este a escolha do método, tipo e dimensão dos produtos a serem.

**Fundamentos de funcionamento do produto médico**

A utilização dos produtos do Sistema de Fixação Rígida – Footfix Traumec, desde que realizada de acordo com as orientações do Fabricante, resulta em uma consolidação óssea segura, o que é fundamental para o sucesso do tratamento.

A função dos produtos do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec é estabilizar os ossos do pé e do ante pé e manter sua posição até que o processo de reconstrução óssea se consolide.

A combinação entre componentes e instrumentais de outros fabricantes não é recomendada e deve respeitar as orientações fornecidas pelo fabricante nas Instruções de Uso que acompanham o produto.

**Precauções e restrições ao uso do produto**

Em caso de dúvida sobre o material ou técnica cirúrgica contate o fabricante ou o distribuidor mais próximo. O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do material.

Nenhum material etiquetado ou designado como produto de uso único deve voltar a ser utilizado, reprocessado ou esterilizado, e deverá ser descartado de forma adequada após o uso. Recomendamos que o material não utilizado a ser descartado seja higienizado, deformado e/ou cortado de forma que identifique claramente a situação de impróprio para o uso, e sejam descartados conforme as normas da autoridade sanitária local. Este produto foi projetado para uso único a fim de garantir a segurança do paciente.

Para colocação adequada dos implantes, a Traumec recomenda a utilização de instrumentais específicos e exclusivos. Os instrumentais devem ser adquiridos separadamente e **NÃO COMPÕEM** o produto, pois não



integram a forma de apresentação dos implantes - embalagem individual. Os implantes da Traumec somente devem ser utilizados com o auxílio dos instrumentais da Traumec.

Resultados insatisfatórios podem ser observados em caso de:

- Seleção inapropriada, mau posicionamento e/ou má fixação do produto.
- Intolerância pelo paciente aos materiais utilizados na fabricação do produto. É observada uma prevalência alérgica ao titânio de 0,6% na população.
- Impossibilidade do paciente em seguir o tratamento de reabilitação prescrito pelo cirurgião.

### **Eventuais efeitos adversos**

Caso o produto médico esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Traumec. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua 1 CA, 202 – Bairro Cidade Azul II – CEP 13505-820 - Rio Claro/SP.

As reclamações de clientes são tratadas conforme a RDC 67/2009 que dispõe sobre normas de tecnovigilância aplicáveis aos detentores de registros de produtos para saúde no Brasil.

Caso haja necessidade de realizar alguma reclamação referente aos produtos do Sistema de Fixação Rígida – Footfix Traumec relacionada a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano do componente metálico implantável, problemas graves ou morte relacionados com esses componentes, o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente e a TRAUMEC através do e-mail [qualidade@traumec.com.br](mailto:qualidade@traumec.com.br) ou pelo telefone (19) 3522-1177, em casos de dúvidas o cirurgião responsável ou o profissional de saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no endereço <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes> link NOTIVISA.

### **Contraindicação**

- Condições físicas que eliminem ou tendem a eliminar o suporte adequado do implante ou retardar a cura, limitações no fornecimento de sangue, insuficiência na qualidade ou quantidade de osso, baixa qualidade de pele, infecções prévias etc.;
- Condições mentais ou neurológicas que tendam a substituir as habilidades dos pacientes ou a boa vontade para restringir as atividades durante o período de recuperação, mal de Parkinson, alcoolismo crônico, articularção de Charcot, abuso de drogas, retardo ou enfermidade mental etc.;
- Sensibilidade corporal extrema. Quando existir qualquer suspeita de hipersensibilidade ao material, antes de determinar a seleção do material implantável deverá realizar provas apropriadas;
- Atrofia de pele ou falta de cobertura tecidual. Em uma profunda atrofia de pele, qualquer dispositivo de fixação interna deverá ser colocado com extremo cuidado, pois o risco de infecções ou problemas de recuperação das feridas é bem maior;
- Infecções ativas;
- Gravidez;



- Obesidade;
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);
- Sensibilidade a corpo estranho. Quando houver suspeita de sensibilidade ao material, os testes apropriados devem ser realizados para excluir essa possibilidade antes do implante;
- Limitações no fluxo sanguíneo e/ou infecções anteriores que possam tornar a cicatrização lenta e aumentar a possibilidade de infecção e/ou rejeição dos implantes;
- Qualquer processo de doença degenerativa que possa afetar adversamente a colocação apropriada dos implantes;
- Estas contraindicações podem ser relativas ou absolutas. No uso destes dispositivos deve cuidar-se do peso e das vantagens contra as possíveis complicações e considerar o exame clínico completo e as contraindicações listadas anteriormente;
- Não aconselhamos a mistura de diferentes componentes biomédicos não compatíveis, que podem elevar o risco de corrosão, tampouco produtos similares de terceiros, cuja compatibilidade geométrica e mecânica não é conhecida. Os resultados clínicos e durabilidade do implante dependerão da técnica cirúrgica adotada, que deverá ser adequada ao tipo de produto.

**Advertências**

Este dispositivo médico exige procedimento cirúrgico especializado. Somente deverá ser executado por cirurgiões habilitados com treinamento específico incluindo diagnóstico, planejamento pré-operatório e protocolo cirúrgico. O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e condições inadequadas, incluindo o ambiente cirúrgico, poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.

O fabricante se isenta de responsabilidade por quaisquer complicações relacionadas a indicações incorretas dos procedimentos cirúrgicos ou do uso de implantes, técnica operatória inadequada, falta de assepsia, e àquelas relacionadas aos limites dos métodos de tratamento.

Este produto é de uso único e de reprocessamento proibido.

Não utilizar componentes de materiais diferentes dos apresentados no sistema.

**Cuidados especiais**

A Traumec não se responsabiliza pela colocação do produto com utilização de outros tipos de instrumental. Os instrumentais não fazem parte desse registro e devem ser adquiridos separadamente.

**Cuidados para Conservação e Armazenagem**

Os produtos devem ser armazenados em local seco, arejado e ao abrigo da luz solar direta, em sua embalagem original.



**Cuidados no Manuseio**

- É recomendado que os componentes do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec sejam desembalados e esterilizados imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições;
- Qualquer implante que tenha caído, arranhado, entalhado ou tenha sofrido qualquer outro dano deve ser descartado;
- O local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco, longe do calor, ao abrigo de luz direta, e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade física e química.
- Os efeitos de vibração, choques, corrosão, temperatura acima de 45°, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados;
- O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte também devem ser explicitados;
- O produto deve ser armazenado em temperatura entre 15°C e 45°C em ambiente de umidade de até 75%.

**Recomendações Gerais**

Para reduzir o risco de infecção, os implantes devem ser submetidos a um processo de limpeza antes da esterilização, assim como todos os instrumentais cirúrgicos devem ser limpos e descontaminados, antes e após a cirurgia, e antes da esterilização, utilizando os métodos de limpeza descritos abaixo.

Cabe ressaltar que é de responsabilidade do hospital a validação dos métodos de limpeza e desinfecção utilizados, de acordo com as boas práticas e conhecimentos existentes e pelas recomendações dos órgãos públicos competentes. Caso o hospital não garanta o método utilizado, recomenda-se que o material não seja implantado.

**Limpeza manual**

- A limpeza manual dos implantes e instrumentais cirúrgicos, quando efetuada adequadamente, pode evitar danos e/ou avarias aos implantes.
- Os implantes e instrumentais devem ser removidos de suas embalagens e imersos em um recipiente apropriado contendo detergente enzimático com pH neutro. OBS: O detergente enzimático utilizado deve possuir registro junto a ANVISA e as especificações de concentração, tempo de imersão e temperatura da solução devem ser realizadas exatamente como descritas nas instruções de uso recomendada pelo fabricante desta solução.
- Para executar o processo de limpeza manual, deve-se utilizar escova apropriada, de preferência de nylon. Nunca utilize escova de aço ou esponjas abrasivas. Isto provoca ruptura da camada passivadora,



causando corrosão. Cuidados extras devem ser tomados com as juntas, elementos tubulares e cortantes.

- Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

#### **Lavagem por lavadora termo desinfetadora (Limpeza automática)**

- Os implantes e instrumentais cirúrgicos devem ser colocados nas bandejas do equipamento para não causar danos ou avarias uns aos outros. Os implantes e instrumentais cirúrgicos que são fabricados em materiais dissimilares devem ser limpos separadamente para evitar corrosão;
- Fazer o carregamento da câmara do equipamento conforme orientação do fabricante do equipamento. Selecionar o ciclo da lavagem apropriado conforme estabelecido pelo fabricante do equipamento ou pela validação do processo de limpeza da instituição. Acionar o equipamento e ao término do ciclo, remover os cestos;
- Utilizar detergente enzimático com pH neutro, o qual deve possuir registro junto à ANVISA e as especificações de concentração, temperatura e tempo de imersão devem ser realizadas exatamente como descritas nas instruções de uso recomendadas pelo fabricante desta solução;
- Utilizar água destilada estéril para a realização do processo de enxágue. Os implantes e instrumentais cirúrgicos devem ser secos imediatamente após o término da limpeza com pano de limpeza que não libere fibras.

#### **Limpeza Ultrassônica**

- Os implantes e instrumentais cirúrgicos que são fabricados em materiais dissimilares devem ser limpos separadamente para evitar corrosão;
- Mantenha o recipiente de lavagem com 50% do conteúdo de solução para lavagem. A Traumec recomenda que seja utilizada uma faixa de frequência de 25 a 40Hz por um tempo de 15 a 45 minutos. Utilizar detergente enzimático com pH neutro, o qual deve possuir registro na ANVISA e as especificações de concentração, temperatura e tempo de imersão devem ser realizadas exatamente como descritas nas instruções de uso recomendadas pelo fabricante desta solução;
- Enxágue os implantes e instrumentais cirúrgicos cuidadosamente;
- Nos banhos ultrassônicos sem a fase de enxágue, os instrumentais cirúrgicos devem ser cuidadosamente enxaguados manualmente e, de preferência, com água destilada estéril.

#### **Esterilização**

Os componentes do Sistema de Fixação Rígida - Footfix são fornecidos **NÃO ESTÉREIS** e são de **USO ÚNICO** devendo ser esterilizados antes da sua utilização.

O local de esterilização do produto deverá proceder todos os requisitos técnicos de esterilização antes de submetê-lo ao processo de esterilização (testes biológicos e físicos da autoclave). É de total responsabilidade do hospital a validação do processo de esterilização.



Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. É responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

**Recomendamos apenas o processo em AUTOCLAVE A VAPOR para esterilização dos implantes.**

Utilizar autoclave hospitalar, de acordo com o procedimento padrão adequado. Norma aplicável para esterilização em autoclave a vapor: *NBR ISO 17665-1:2010 - Esterilização de produtos para saúde - Vapor Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde*. A Tabela 49 sumariza os parâmetros de esterilização utilizados na autoclave.

Tabela 3: Parâmetros para a esterilização em autoclave

Método	Ciclo	Temperatura	Tempo de exposição
Vapor	Gravidade	132 – 135 °C	10 a 25 minutos
Vapor	Pré vácuo	132 – 135 °C	3 a 4 minutos

**Advertências para manuseio**

- A correta manipulação do implante antes e durante a operação é decisiva para o sucesso do implante;
- O produto não pode ser reutilizado;
- Não utilizar componentes de materiais diferentes dos apresentados, para evitar falhas nos produtos (corrosão, desgaste etc.);
- Utilizar somente materiais com a mesma composição química.

**Técnica Cirúrgica**

As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao mesmo a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

A Traumec recomenda que o cirurgião leia e compreenda integralmente as informações contidas nas instruções de uso. Caso necessite de alguma informação adicional, o cirurgião deve contatar a Traumec antes da implantação do dispositivo médico. A implantação do dispositivo médico não deve ocorrer caso o cirurgião possua dúvidas quanto a indicação de uso, quantidade e/ou técnica cirúrgica a ser aplicada. Não cabe ao fabricante a indicação de técnica cirúrgica a ser aplicada. Todo procedimento cirúrgico deve considerar o caso clínico do paciente também a qualificação do cirurgião. Apenas cirurgiões qualificados na implantação do dispositivo médico devem realizar a implantação desse sistema. A Traumec se isenta de qualquer responsabilidade pela seleção de técnica cirúrgica equivocada.

A utilização deste material deverá ser feita apenas nas indicações e dentro dos parâmetros tecnicamente aceitos no país.





A TRAUMEC não é responsável pela indicação da melhor técnica cirúrgica caso a caso, entretanto, como sequencia possível a técnica cirúrgica é apresentada abaixo:

- 1) Preparação da superfície articular;
- 2) Osteotomia;
- 3) Redução da Fratura;
- 4) Moldagem da Placa, se necessário;
- 5) Colocação da Placa;
- 6) Inserção de Fios de kirschner para fixação temporária da placa;
- 7) Aplicação das pinças de compressão;
- 8) Perfuração prévia para parafusos de bloqueio;
- 9) Verificação do tamanho do parafuso;
- 10) Inserção dos parafusos;
- 11) Bloqueio dos parafusos.

**A TRAUMEC se isenta de qualquer responsabilidade pela seleção incorreta dos dispositivos implantados e/ou utilização de técnica cirúrgica equivocada.**

A TRAUMEC recomenda que o cirurgião leia e compreenda integralmente as informações contidas nas Instruções de Uso. Caso necessite de alguma informação adicional, o cirurgião deve contatar o fabricante antes da implantação do dispositivo médico. A implantação do dispositivo médico não deve ocorrer caso o cirurgião possua dúvidas quanto à indicação de uso, dimensão dos componentes que serão implantados e/ou técnica cirúrgica a ser aplicada.

#### **IMPORTANTE**

A utilização deste material deverá ser feita apenas nas indicações relatadas nas Instruções de Uso que acompanham o produto e dentro dos parâmetros tecnicamente aceitos no país. A indicação de uso de técnica cirúrgica específica deve ser avaliada caso a caso por um cirurgião capacitado para tal. Os possíveis riscos, benefícios e chances de eficácia do procedimento também devem ser avaliados caso a caso;

A escolha das dimensões e das condições de uso dos produtos do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec selecionados para a implantação é de responsabilidade exclusiva do cirurgião;

Uma escolha equivocada de técnica cirúrgica pode determinar dificuldades ou complicações pós-operatórias, como a não fixação dos produtos do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec;

O sucesso da consolidação óssea apenas é obtido através da participação responsável de todos os envolvidos neste processo. Cabe ao fabricante oferecer dispositivos aprovados pelo Sistema de Gestão da Qualidade, biocompatíveis, de boa procedência e que atendam a requisitos técnicos normalizados. Cabe ao cirurgião a seleção correta de técnica cirúrgica e do material utilizado, além de todo o estudo pré-operatório. Também cabe ao cirurgião informar ao paciente quais os cuidados devem ser tomados após o procedimento



cirúrgico. Cabe ao paciente o cumprimento de todas as orientações médicas durante o período de pós-operatório.

Não existe procedimento cirúrgico 100% livre de riscos e, embora todas as precauções sejam tomadas para evitar complicações, certos riscos devem ser considerados em qualquer tipo de cirurgia. Da mesma forma, nenhum procedimento médico pode oferecer garantia total de bons resultados. Mesmo não havendo nenhum tipo de complicação, os resultados variam de paciente para paciente, sendo que poderão ocorrer casos em que pacientes não irão se beneficiar dos procedimentos.

### **Tratamento pós-operatório**

A mobilização física deve ser iniciada imediatamente após o pós-operatório incluindo exercícios de movimentação. Restrições podem ser apropriadas em casos especiais, a critério do cirurgião.

Os dispositivos não substituem o osso sadio. Não deve ser aplicada carga após a cirurgia, uma vez que o paciente deverá seguir as recomendações médicas para que o implante exerça sua função.

Não se pode esperar que os implantes suportem o esforço exercido sobre o dispositivo pelo suporte total ou parcial do peso corporal ou de carga, particularmente na presença de não consolidação, consolidação retardada ou recuperação incompleta. Por isso, é importante que seja mantida a imobilização do local da fratura até ser estabelecida uma firme consolidação óssea. Fatores como o peso corporal, nível de atividade e respeito às limitações do suporte de peso corporal e de cargas por parte do paciente devem ser avaliados pelo cirurgião.

Os cuidados pós-operatórios incluem, mas não se limitam aos seguintes aspectos:

- Restrição do nível de atividade até se atingir a consolidação do osso ou artrodese total da articulação do osso.
- Evitar qualquer tipo de atividades que possam ocasionar torções, quedas e/ou choques que podem ocasionar falhas no dispositivo.
- Cuidados com a cicatrização.

### **Remoção do Implante**

É do cirurgião a decisão final sobre a remoção do implante. Recomendamos que sempre que possível e prático para o paciente, o implante deve ser removido, visto que sua função como um auxiliar na consolidação foi desempenhada. A remoção do implante deve ser seguida por um adequado pós-operatório para evitar o risco de uma nova fratura.

Os riscos da remoção também incluem os riscos associados a qualquer tipo de cirurgia bem como os riscos associados à anestesia geral.

Caso o cirurgião necessite fazer a remoção para uma análise ou investigação, o implante deve ser explantado, se possível, na presença de pessoa autorizada pelo fabricante. Este produto deverá ser enviado para análise conforme determinado pelo fabricante.



**Forma de Descarte do implante utilizado**

Descarte e não use dispositivos danificados. Recomenda-se, que o implante seja deformado ou cortado de forma que identifique claramente a situação de impróprio para o uso. Os implantes que forem extraídos do paciente devem ser descartados em lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local. Estes procedimentos irão assegurar a inutilização do produto a ser descartado de forma que não possa ser indevidamente reaproveitado.

**Limites de moldagem do implante**

O produto pode ser moldado. O limite para a moldagem é a própria anatomia do osso em que será utilizado. Esse não deve ser dobrado em ângulos agudos, dobrado ao contrário, riscado ou deformado e, uma vez moldado não pode ser novamente moldado para a sua forma original, o que pode acarretar fratura e conseqüentemente falha na função do produto.

**Rastreabilidade dos Produtos**

A TRAUMEC, como fabricante de produtos para a saúde, é responsável pela rastreabilidade do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec. Os componentes do sistema, que possuem área suficiente, são identificados de forma a possibilitar sua rastreabilidade, através de marcação a laser do logo da empresa, do código de referência e o número do lote. Os componentes que não possuem área suficiente para marcação são rastreados pelas informações que constam na rotulagem.

Dentro da embalagem primária seguem 04 (quatro) etiquetas de rastreabilidade contendo os seguintes dados:

- código do produto;
- descrição do produto;
- número do lote;
- número de registro na ANVISA;
- identificação do fabricante;
- validade do produto.

Recomenda-se que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas conforme indicado abaixo:

- Etiqueta 1: fixada no Prontuário clínico do paciente;
- Etiqueta 2: fixada no Laudo entregue ao paciente;
- Etiqueta 3: fixada no Documento Fiscal;
- Etiqueta 4: permanece no Controle do Fornecedor;

**Caracterização do limite de peso**

Embora os ensaios comprovem que a resistência mecânica dos produtos testados seja superior às cargas resultantes de atividades normais diárias, os implantes utilizados em cirurgia servem apenas para auxiliar e promover um processo normal de consolidação óssea. Esses implantes não têm a função de substituir



estruturas ósseas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com fraturas não consolidadas.

Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o tipo de suporte físico, limite de peso, adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

### Forma de apresentação do produto médico

Todos os componentes do Sistema de Fixação Rígida - Footfix Traumec são comercializados unitariamente em embalagem plástica transparente de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) selada termicamente, acompanhado de 04 Etiquetas de Rastreabilidade, como indicado na Figura 3.



Figura 3 - Produto dentro da embalagem com a rotulagem.

### Modelo de Etiqueta de Rastreabilidade



Figura 4 - Modelo de Etiqueta de Rastreabilidade

A Traumec recomenda as seguintes observações:

- Recomenda-se que o hospital mantenha a identificação dos componentes implantados no prontuário do paciente, para tornar possível a rastreabilidade dos implantes utilizados, através do registro de, no mínimo, código, número de lote e número de registro do produto.



- Recomenda-se que as informações de rastreabilidade registradas no prontuário sejam repassadas ao paciente.
- Eventos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados ao órgão sanitário competente (ANVISA), com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto.

### **Marcação**

Todas as placas presentes nesse sistema recebem marcação á laser contendo as seguintes informações: Lote, Logotipo e Dimensão. Os parafusos não possuem área suficiente para marcação, dessa forma, são rastreados pelas informações que constam na rotulagem.

### **Dados do Fabricante**

Traumec Tecnologia e Implantes Ortopédicos Importação e Exportação Ltda

CNPJ: 09.123.223/0001-10

Rua 1CA, nº 202 - Cidade Azul II - Rio Claro - CEP 13505-820 - Brasil

Fone: +55 (19) 3522-1177 - [www.traumec.com.br](http://www.traumec.com.br)

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: +55 (19) 9 9600-1557 | e-mail: [sac@traumec.com.br](mailto:sac@traumec.com.br)

Revisão 02 - 12/08/2021

