

INSTRUÇÃO DE USO

Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos

Nome Comercial: Kit Instrumental CMF - Traumec

Componentes do Kit: Descritos na Tabela 1

Material: Aço Inox 304, 420, Poliacetal, Liga de Titânio F136, Polipropileno e Silicone

Validade: Indeterminado

Produto Não Estéril – Esterilizado antes do uso








Método indicado: Esterilização por Vapor
















Produto Passível de Reprocessamento

Verifique a revisão da Instrução de Uso disponível no site www.traumec.com.br, pois deve ser a mesma da rotulagem do produto. A Instrução de Uso de forma eletrônica está disponível para download através do site ou solicitada impressa pelo e-mail: sac@traumec.com.br ou pelo fone: +55 (19) 3522-1177, sem custo adicional, conforme requisitos da norma IN nº 4 de 2012.










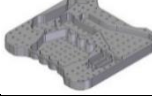




COMPONENTES DO KIT

A Tabela 1 abaixo apresenta os códigos, descrições e especificações técnicas de cada componente do Kit Instrumental CMF - Traumec:






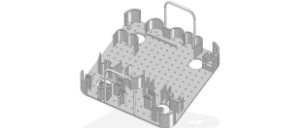







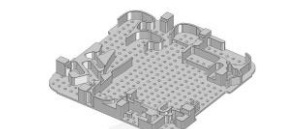
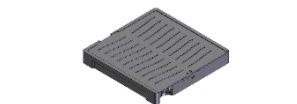
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.0080	Alicate de Corte 1,5 - 2,0	Auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos para cortar placas	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Carboneto de Tungstênio	94x181mm	
PA.02.03.3966	Cabo guia do transbucal Slim	Instrumento de conexão com o guia transbucal	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	113x139mm	
PA.02.03.1579	Retrator de Bochecha do Transbucal	Auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	93x20mm	
PA.02.03.2747	Cabo Engate Rápido Modelo 1 Médio	Auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos e tem como função acoplar a ponteira ou macho para uso durante o procedimento cirúrgico.	Poliacetal + TI F136 + Aço Inoxidável ASTM F899 Austenítico	107x23mm	
PA.02.03.3967	Tubo para broca 1,5 - 2,0 Slim	Guiar a broca para o furo	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	46x22mm	
PA.02.03.3965	Punção do transbucal Slim	Auxiliar na marcação para perfuração óssea	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	53x22mm	
PA.02.03.3968	Tubo para ponteira 1.5 - 2.0 Slim	Guia para ponteira cross drive	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	11x22mm	












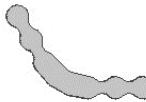
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.0081	Alicate de modelação 1,5	Modelar placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	138x45mm	
PA.02.03.0082	Alicate de modelação 2,0	Modelar placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	136x45mm	
PA.02.03.0834	Pinça para placas nº2	Manusear implantes	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	152x9,5mm	
PA.02.03.1580	Posicionador de placa	Posicionar implantes	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	162x6,5mm	
PA.02.03.0090	Medidor de profundidade BMF	Medir profundidade do furo	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	156x9mm	
PA.02.03.0086	Guia de broca duplo	Guia de broca para perfuração óssea	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	142x11mm	
PA.02.03.0083	Alicate dobrador 1,5 - 2,0	Dobrar placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	142x54mm	
PA.02.03.0099	Ponteira cross drive 1,5 para contra ângulo	Instrumento para inserção e torque de parafusos	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	17x2,5mm	
PA.02.03.0100	Ponteira cross drive 2,0 para contra ângulo	Instrumento para inserção e torque de parafusos	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	17x3,5mm	
PA.02.03.0093	Ponteira cross drive 1,5	Instrumento para inserção e torque de parafusos	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	95x3,15mm	
PA.02.03.0094	Ponteira cross drive 2,0	Instrumento para inserção e torque de parafusos	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	95x3,15mm	
PA.02.03.3196	Ponteira de Bloqueio Cross Drive 2,0	Instrumento para inserção e torque de parafusos de bloqueio	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Silicone + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	98x7,25mm	
PA.02.03.0401	Broca Ø1,5 x 50mm com stop 5mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35mm	
PA.02.03.0405	Broca Ø1,5 x 50mm com stop 20mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35mm	
PA.02.03.0161	Broca Ø1,1 x 50mm com stop 5mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35mm	








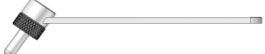

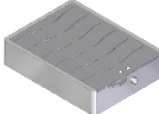

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.0165	Broca Ø1,1 x 50mm com stop 20mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35mm	
PA.02.03.0191	Broca Ø1,1 x 100mm com stop 5mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35mm	
PA.02.03.0195	Broca Ø1,1 x 100mm com stop 20mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35mm	
PA.02.03.0431	Broca Ø1,5 x 100mm com stop 5mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35mm	
PA.02.03.0435	Broca Ø1,5 x 100mm com stop 20mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35mm	
PA.02.03.2971	Estojo trauma 1,5 nº1, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	222x215mm	
PA.02.03.2974	Estojo trauma 2,0 nº1, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	222x215mm	
PA.02.03.4206	Container 1.5/2.0 CMF DIN1/2x100 AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	272x272mm	
PA.02.03.4202	Bandeja 1.5/2.0 Superior AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	254x254mm	
PA.02.03.4203	Bandeja 1.5/2.0 Inferior AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	254x254mm	
PA.02.03.0112	Modelador de placa 2.4	Modelar placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	228x64 x25mm	
PA.02.03.0092	Pinça fixadora de placas nº2	Auxiliar na fixação de placas	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	151x93x 10mm	
PA.02.03.0091	Pinça fixadora de placas nº1	Auxiliar na fixação de placas	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	151x93x 10mm	
PA.02.03.0643	Broca Ø1,8 x 50mm com stop 10mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35x 2,35mm	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.0645	Broca Ø1,8 x 50mm com stop 20mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35x 2,35mm	
PA.02.03.0673	Broca Ø1,8 x 100mm com stop 10mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35x 2,35mm	
PA.02.03.0675	Broca Ø1,8 x 100mm com stop 20mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35x 2,35mm	
PA.02.03.0089	Macho 2.4	Instrumento de perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	108x3,5x 3,5mm	
PA.02.03.0095	Ponteira cross drive 2.4	Instrumento para inserção e torque de parafusos	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	94x3,2x 3,2mm	
PA.02.03.4204	Bandeja 2.4 CMF Inferior AL	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	254x254mm	
PA.02.03.3014	Alicate de corte tipo 1	Auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos para cortar placas	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Carboneto de Tungstênio	220x105x 15mm	
PA.02.03.0109	Cabo guia transbucal nº02	Instrumento de conexão com o guia transbucal	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	130x108x 20mm	
PA.02.03.0105	Punção do transbucal	Auxiliar na marcação para perfuração óssea	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	58x16x16mm	
PA.02.03.2968	Tubo para ponteira 2.4	Guia para ponteira cross drive	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	22,5x11mm	
PA.02.03.2967	Tubo para broca 2.4	Guia de broca para perfuração óssea	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	22,5x47mm	
PA.02.03.0085	Guia para broca simples	Guia de broca para perfuração óssea	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	150x36x 13mm	
PA.02.03.2970	Retorcedor de Placa Tipo 1	Modelador de placas	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	170x27x 12mm	
PA.02.03.4205	Bandeja 2.4 CMF Superior AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	254x254mm	
PA.02.03.2977	Estojo trauma - 2,4 nº1 Al e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	220x160x 25mm	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.2780	Template para Placa reta 4F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	30,6x6,6mm	
PA.02.03.2782	Template para Placa reta 6F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	46,6x6,6mm	
PA.02.03.2796	Template para Placa reta 20F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	158,6x 6,6mm	
PA.02.03.2814	Template para Placa reta ponte 10mm 4F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	32,6x6,6mm	
PA.02.03.2818	Template para Placa reta ponte 10mm 6F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	48,6x6,6mm	
PA.02.03.2860	Template para Placa angulada reconstrução mandibular 5 x 19F dir.	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	179,6x 41,8mm	
PA.02.03.2861	Template para Placa angulada reconstrução mandibular 5 x 19F esq.	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	179,6x 41,8mm	
PA.02.03.2873	Template para Placa angulada reconstrução mandibular 5 x 19 x 5F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	208,6x 41,8mm	
PA.02.03.2783	Template para Placa reta 7F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	54,6x6,6mm	
PA.02.03.2792	Template para Placa reta 16F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	126,6x 6,6mm	
PA.02.03.2834	Template para Placa orbital 6F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	45,1x6,6mm	
PA.02.03.2849	Template para Placa angulada para reconstrução mandibular 3 x 3F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	49,3x 16,6mm	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.2877	Parafuso para Modelagem da Placa de #2mm Cross Drive	Garantir a integridade da rosca das placas durante o processo de modelagem, não devendo em hipótese alguma entrar em contato direto com o paciente	Titânio	Ø3,2x5mm	
PA.02.03.2878	Parafuso para Modelagem da Placa de #2,5mm Cross Drive	Garantir a integridade da rosca das placas durante o processo de modelagem, não devendo em hipótese alguma entrar em contato direto com o paciente	Titânio	Ø3,2x6mm	
PA.02.03.2876	Parafuso para modelagem de placa de #1,5mm Cross Drive	Garantir a integridade da rosca das placas durante o processo de modelagem, não devendo em hipótese alguma entrar em contato direto com o paciente	Titânio	Ø4,0x1,8mm	
PA.02.03.4201	Tubo de Broca 2.0 Locking	Guia de broca para perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	Ø22,5x53mm	
PA.02.27.0011	Alicate Modelador Mod. 03	Modelador de placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	90,5X 147,50mm	
PA.02.27.0024	Guia de Brocas Universal Sistema 2,0/2,4	Guia de broca para perfuração óssea	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	85,8x11mm	
PA.02.27.0005	Alicate Modelador Mod. 01	Modelador de placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	140,9x9mm	
PA.02.03.2975	Estojo trauma 2,0 nº2, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	240x160x 25mm	
PA.02.03.2997	Estojo trauma 2.0 nº4, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	230x235,6x 25,5mm	


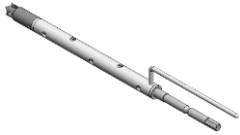
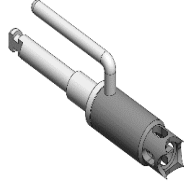









CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.4207	Container 2.4 CMF DIN1/2x100 AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	272x272mm	
PA.02.03.4212	Bandeja Lock CMF 2.0 AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	257x257mm	
PA.02.03.4213	Caixa Lock CMF 2.0 AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	290x274mm	
PA.02.11.0017	Cabo de Engate Rápido para Distrator Trans Palatal	Auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos e tem como função acoplar a ponteira ou macho para uso durante o procedimento cirúrgico.	Poliacetil + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	Ø23x107mm	
PA.02.11.0018	Chave Articulada 7 mm	Utilizado para a ativação do Distrator Trans Palatal	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	8x16x100mm	
PA.02.11.0019	Pinça Posicionadora do Distrator Trans Palatal	Posicionar o distrator Trans Palatal	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	188x81x6mm	
PA.02.11.0023	Estojo para Instrumentais do Distrator Trans Palatal	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	209x207mm	
PA.02.11.0024	Chave fixa center drive 1,2mm	Inserção do parafuso bloqueador no Distrator Trans Palatal	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Poliacetal	Ø11,5x 126,5mm	
PA.02.03.0833	Pinça para placas nº1	Manusear implantes	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	180x11x5mm	
PA.02.11.0009	Template para distrator 9 mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	Ø8x9mm	
PA.02.11.0010	Template para distrator 15 mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	Ø8x15mm	
PA.02.11.0011	Template para distrator 20 mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	Ø8x20mm	

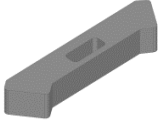

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.11.0012	Template para distrator 27 mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	Ø8x27mm	
PA.02.11.0013	Template para distrator 33 mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	Ø8x33mm	
PA.02.11.0033	Chave Articulada 4,75 mm	Utilizado para a ativação do Distrator Trans Palatal	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	8x16x100mm	
PA.02.11.0044	Pinça Posicionadora do Distrator Trans Palatal Slim	Auxiliar no posicionamento do distrator	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	188x81x6mm	
PA.02.11.0038	Chave Bloqueadora Center Drive Distrator Trans Palatal	Inserção do parafuso bloqueador no Distrator Trans Palatal	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	Ø3,18x95mm	
PA.02.11.0046	Estojo para Instrumentais do Distrator Trans Palatal Slim	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	29x190x200mm	
PA.02.11.0039	Template Trans Palatal 9mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	3x5x19mm	
PA.02.11.0040	Template Trans Palatal 15mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	3x5x22mm	
PA.02.11.0041	Template Trans Palatal 20mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	3x5x25mm	
PA.02.11.0042	Template Trans Palatal 27mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	3x5x28mm	
PA.02.11.0043	Template Trans Palatal 33mm	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Titânio	3x5x33mm	
PA.02.03.2976	Estojo trauma 2,0 nº3, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	124x80,5mm	

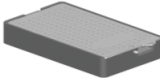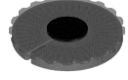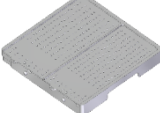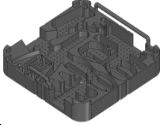


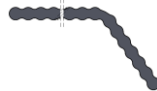










CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.4450	Cabo para Chave para Membrana	Auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos e tem como função acoplar a ponteira ou macho para uso durante o procedimento cirúrgico.	Poliacetal + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	Ø23x 106,3mm	
PA.02.03.4180	Ponteira para Membrana	Instrumento para inserção e torque de parafusos enquanto impede movimentação da membrana durante a aplicação do parafuso	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	106,8x 12,25mm	
PA.02.03.4181	Ponteira Contra Ângulo para Membrana	Instrumento para inserção e torque de parafusos enquanto impede movimentação da membrana durante a aplicação do parafuso.	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	29,8x 9,25mm	
PA.02.03.2770	Alicate de corte pequeno tipo tesoura	Cortar placas	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Carboneto de Tungstênio	123x52mm	
PA.02.03.3923	Cabo engate rápido CMF Ti/Al	Auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos e tem como função acoplar a ponteira ou macho para uso durante o procedimento cirúrgico.	Titânio + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	107x24mm	
PA.02.03.2973	Estojo Trauma 1.5 n.3 Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	118x200mm	
PA.02.03.2986	Estojo Parafuso 1.5 n.2 Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	Ø100mm	
PA.02.03.2980	Estojo ortognático nº1, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209 + Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899	180x125x 25mm	
PA.02.03.4210	Bandeja O.S. 1.5/2.0 AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	257x257mm	
PA.02.03.4211	Caixa O.S. 1.5/2.0 CMF AL	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	290x274mm	


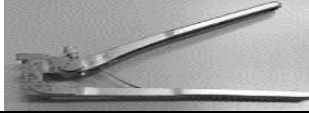
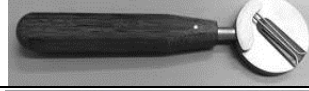

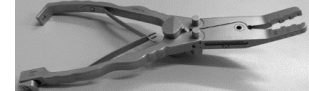



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.3005	Estojo parafuso 1.5 nº3, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	215x150mm	
PA.02.03.0164	Broca Ø1.1 x 50mm com stop 15mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35mm	
PA.02.03.0194	Broca Ø1.1 x 100mm com stop 15mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35mm	
PA.02.03.0404	Broca Ø1.5 x 50mm com stop 15mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	50x2,35mm	
PA.02.03.0434	Broca Ø1.5 x 100mm com stop 15mm engate J-Latch	Perfuração óssea	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	100x2,35mm	
PA.02.03.4441	Box CMF P1 PPSU Azul Translúcido	Acondicionar dispositivos médicos	PPSU	160x140mm	
PA.02.03.4451	Núcleo do Estojo de Parafusos Membrana	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	215x150mm	
PA.02.03.4452	Tampa do Estojo de Parafusos Membrana	Tampar o estojo de parafusos de membrana	PPSU	50x2,35mm	
PA.02.03.4453	Ponteira Membrana para Contra Ângulo	Instrumento para inserção e torque de parafusos	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	Ø2,5x 26,5mm	
PA.02.03.4208	Bandeja Neuro SYS	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209	254x254mm	
PA.02.03.4209	Caixa Neuro SYS AL DIN1/2x85, PPSU Azul Translúcido	Acondicionar dispositivos médicos	Alumínio NBR ISO 209 + PPSU	246x246mm	
PA.02.03.2972	Estojo trauma 1,5 nº2, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	215x150mm	
PA.02.03.4200	Estojo Neuro nº1, Alumínio e Inox	Acondicionar dispositivos médicos	Aço Inoxidável Austenítico ASTM F899 + Alumínio NBR ISO 209	120x200mm	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.4214	Template para Placa Locking Recon. Mandibular Reta 10F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	80x8mm	
PA.02.03.4215	Template para Placa Locking Recon. Mandibular Reta 20F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	160x8mm	
PA.02.03.4216	Template para Placa Locking Recon. Mandibular Reta 24F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	192x8mm	
PA.02.03.4217	Template para Placa Locking Recon. Mandibular Angulada 23x7F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	220,7x 52,1mm	
PA.02.03.4218	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DR 24x6F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	214,3x66mm	
PA.02.03.4219	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DR 20x5F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	180x57,5mm	
PA.02.03.4220	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DR 22x5F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	195x60,5mm	
PA.02.03.4221	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DRA 18x4F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	172,6x 70,7mm	
PA.02.03.4222	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DR 5x20x5F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	203,4x 57,5mm	
PA.02.03.4223	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DR 5x22x5F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	218,2x 60,5mm	
PA.02.03.4224	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DR 6x24x6F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	241,2x 66,3mm	
PA.02.03.4225	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DA 6x22x6F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	215,4x 71,9mm	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
PA.02.03.4226	Template para Placa Locking Recon. Mandibular DA 6x20x6F	Auxiliar o cirurgião na escolha do tamanho e modelo de implante a ser utilizado	Alumínio NBR ISO 209	195,4x 71,9mm	
PA.02.03.3961	Modelador universal de placas	Modelador de placas	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	30x110x 200mm	
PA.02.03.3962	Cortador cizalhador de placas	Cortar placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 + Poliacetal	146x40x14,5	
PA.02.03.3963	Modelador retorcedor de placas	Modelar placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	240x65x30	
PA.02.03.3964	Alicate Modelador, retorcedor e cortador de placas	Modelar, retorcer e cortar placas do sistema	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	40x100x 230mm	
PA.02.03.2879	Parafuso para Modelagem da Placa de #3mm Cross Drive	Garantir a integridade da rosca das placas durante o processo de modelagem, não devendo em hipótese alguma entrar em contato direto com o paciente	Titânio	Ø4,0x3,3mm	

ACESSÓRIOS

O Kit Instrumental CMF - Traumec não possui acessórios.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O Kit Instrumental CMF - Traumec é fornecido NÃO ESTÉRIL, embalado individualmente em embalagem de filme de polietileno selado termicamente e devidamente rotulado, conforme RDC 185 de 2001.

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

Os componentes do Kit Instrumental CMF - Traumec são dispositivos médicos desenvolvidos especialmente para serem utilizados em conjunto com os dispositivos implantáveis, auxiliando o cirurgião em sua implantação. Os componentes do Kit Instrumental CMF - Traumec são práticos, de fácil manejo e com características específicas que diminuem os riscos durante a cirurgia.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/MECANISMO DE AÇÃO

Cada tipo de instrumental do Kit Instrumental CMF - Traumec tem uma função específica que estão descritas abaixo:

- Alicates de Corte = Cortar placas;
- Alicates de modelação e Retorcedores de placa = Modelar placas;



- Alicates dobradores = Dobrar placas;
- Guias de broca = Guiar as perfurações ósseas;
- Machos = Fazer rosca no canal perfurado;
- Medidores de profundidade = Medir profundidade do furo;
- Pinças fixadoras de placas = Auxiliar na fixação de placas;
- Ponteiras cross drive e center drive = Inserir e retirar parafusos;
- Guia transbucal = Guiar perfuração por via externa;
- Brocas = Fazer perfuração óssea;
- Pinças para placas = Manusear implantes;
- Posicionadores de placa = Posicionar implantes;
- Cabos de Engate Rápido e Cabos de Chave = Acoplar as ponteiras ou machos para uso durante o procedimento cirúrgico;
- Templates = Determinar o tamanho e modelo do implante a ser utilizado;
- Parafusos para Modelagem das Placas = Garantir a integridade da rosca das placas durante o processo de modelagem;
- Tubos para broca = Guiar a perfuração óssea;
- Tubos para ponteira = Guiar a ponteira cross drive ou center drive;
- Estojos/Bandejas e Contêineres = Acondicionar dispositivos médicos;
- Ponteiras para Membrana: Instrumento para inserção e torque de parafusos enquanto impede movimentação da membrana durante a aplicação do parafuso.;
- Chaves Articuladas = Utilizado para a ativação do Distrator Trans Palatal e Modelo Slim;
- Pinças Posicionadoras = Posicionar os dispositivos médicos;
- Chaves Fixas e Bloqueadores = Inserção do parafuso bloqueador no Distrator Trans Palatal;

MODO DE USO

Os componentes do Kit Instrumental CMF - Traumec são fornecidos na condição de produto Não Estéril, acondicionados unitariamente em embalagem plástica de polietileno.

É recomendado que os instrumentais sejam desembalados e esterilizados antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições, para evitar a contaminação após a esterilização. Esterilização inadequada do instrumental pode causar infecção.

O método de esterilização indicado é a Esterilização por Vapor.

Os instrumentais são fornecidos limpos e descontaminados pelo fabricante, porém devem ser manipulados e esterilizados adequadamente, conforme informações abaixo, de forma a evitar a contaminação cruzada e consequente infecção ao paciente.



ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

- Limpeza (Primeira utilização dos instrumentais)

Quando os instrumentais forem utilizados pela primeira vez, recomendamos que estes devem ser removidos de suas embalagens originais e lavados com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%.

Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada e secos com pano de limpeza que não libera fibras.

Se o processo de limpeza for realizado em equipamentos termo desinfectores com o auxílio de substâncias desincrustantes, as orientações do fabricante destes equipamentos devem ser adotadas.

- Limpeza (Pós-cirúrgica)

Os instrumentais, após a etapa cirúrgica, podem conter resíduos de tecidos e outros fluidos corporais que podem gerar a formação de camadas de matéria orgânica, dificultando sua remoção nesta etapa de limpeza, e esta situação é agravada com a formação de biofilmes, que é a formação de colônia de bactérias. Caso os instrumentais não sejam devidamente limpos, principalmente nas áreas de difíceis acesso, os resíduos podem ser transferidos para outros pacientes, levando-os às complicações como infecções ou transmissão de doenças. Com isso recomendamos as orientações para limpeza dos instrumentais cirúrgicos a seguir para assegurar a utilização segura, desde que seguido corretamente:

LIMPEZA MANUAL NO CENTRO CIRÚRGICO

- 1 - Imergir o instrumental cirúrgico em recipiente contendo solução com detergente neutro de uso hospitalar e água potável morna (entre 30° e 40° Celsius), conforme a orientação do fabricante.
- 2 - Injetar essa solução dentro das cavidades ou aberturas do instrumental (quando pertinente) com uma seringa de 20ml;
- 3 - Encaminhar o instrumental cirúrgico para o Centro de Material e Esterilização - CME, imediatamente após o término da cirurgia.

LIMPEZA MANUAL NO CENTRO DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO

- 1 - Diluir nova solução de detergente neutro de uso hospitalar, conforme a orientação do fabricante, adicionando água potável morna (entre 30° e 40° Celsius);
- 2 - Imergir todo o instrumental cirúrgico na solução de detergente, lembrando de injetar essa solução também dentro das cavidades e aberturas dos mesmos com uma seringa de 20ml, mantendo a solução em contato com o instrumental por no mínimo 3 minutos ou conforme a orientação do fabricante da solução;
- 3 - Friccionar a superfície externa de cada instrumental com uma esponja macia, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível, certificando-se de que todas as reentrâncias foram lavadas;
- 4 - Friccionar a superfície interna de cada cavidades ou abertura com uma escova macia, ajustada ao tamanho dos mesmos, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível;
- 5 - Enxaguar a superfície externa do instrumental com água potável sob pressão;
- 6 - Enxaguar a superfície interna das cavidades e aberturas injetando água potável sob pressão pelo menos 5 vezes.



LIMPEZA AUTOMATIZADA ULTRASSÔNICA

- 1 - Colocar o instrumental cirúrgico desmontado (quando pertinente), numa lavadora ultrassônica;
- 2 - Iniciar o ciclo, conforme a orientação do fabricante.

ENXÁGUE FINAL

- 1 - Enxaguar todo o instrumental cirúrgico em água corrente, instilando água sob pressão, certificando-se posteriormente da ausência de sujidade.

SECAGEM

- 1 - Colocar o instrumental cirúrgico sobre um pano branco e limpo;
- 2 - Secar cada instrumental externa e internamente com ar sob pressão.

INSPEÇÃO

- 1 - Verificar a presença de sujidade sobre o pano branco;
- 2 - Verificar a presença de sujidade a olho nu, analisando o instrumental do sentido proximal para o distal;
- 3 - Verificar a presença de sujidade com o auxílio de uma lupa, analisando o instrumental do sentido proximal para o distal.

ESTERILIZAÇÃO

Os Instrumentais devem ser esterilizados antes do uso. A seguir constam os parâmetros adequados, os quais devem ser seguidos e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento.

Indicamos o método e os parâmetros validados, os quais estão descritos a seguir:

O processo de Esterilização por Vapor saturado sob pressão deve seguir os seguintes parâmetros:

- Temperatura: 134°C
- Tempo de esterilização: 7 minutos
- Pressão pré-vácuo: 0,30 barA
- Pressão pré-vapor: 1,15 barA
- Pulsos de vácuo: 04 pulsos
- Tempo de secagem: 15 minutos

OBS.: O tempo só deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

O processo de esterilização deve atender a probabilidade teórica da presença de microrganismos vitais de no máximo 1 sobre 10^{-6} (S.A.L. [*Sterility Assurance Level*] nível de garantia de esterilidade = 10^{-6}). As condições do equipamento (autoclave) utilizado durante o processo de esterilização (programa de calibração, manutenção etc.), bem como a garantia da utilização de um processo de esterilização adequado e a comprovação da esterilidade do produto é responsabilidade do pessoal habilitado (central de material) da Instituição Hospitalar.

Produto passível de reprocessamento.



DESCARTE

O descarte de peça desqualificadas, deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, destruir os componentes danificados, evitando o uso posterior de forma indevida. Quando da necessidade de descarte do instrumental, o mesmo deve ser inutilizado imediatamente. O descarte dos instrumentos deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar os instrumentais seguir os procedimentos legais locais do país para descarte de produtos potencialmente contaminantes. Recomendamos a utilização da norma RDC nº 222 de 2018 que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.

COMPOSIÇÃO

Os componentes do kit são fabricados com os seguintes materiais e suas normas:

- Aço Inoxidável conforme a norma ASTM F899-20 - Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments;
- Poliacetal (POM) conforme a norma ABNT NBR 15804-5:2010 - Materiais poliméricos para aplicações médicas. Parte 5: Especificações para polioximetileno (acetal);
- Liga de Titânio (ASTM F136) conforme a norma ASTM F136-13(2021)e1 Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNS R56401);
- Liga de Alumínio conforme norma ABNT NBR ISO 209:2010 - Alumínio e suas ligas - Composição química.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O Kit Instrumental CMF - Traumec deve ser armazenado em local limpo, longe do calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original. As condições de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidado com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

O Kit Instrumental CMF-Traumec deve ser transportado e manuseado em local limpo, longe de calor e abrigo da luz direta e em sua embalagem original, de forma a impedir qualquer dano ou alteração em suas características. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser identificado e segregado.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Após retirado da embalagem, os componentes do Kit Instrumental CMF - Traumec devem ser manipulados cuidadosamente e individualmente, evitando contaminação. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser identificado e segregado.



ADVERTÊNCIAS

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins excluídos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento cirúrgico e causar danos ao implante. A utilização de instrumentos distintos pode acarretar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido; sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso dos instrumentais ou das suas partes. Havendo desempenho variado, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, deve-se imediatamente substituir a peça.

PRECAUÇÕES

Os Instrumentais devem ser mantidos em suas embalagens originais até a sua esterilização e uso.

Após cada uso realizar uma limpeza correta, a fim de evitar incrustações e corrosões.

Somente profissionais especializados e treinados na técnica cirúrgica correspondente poderão utilizar estes instrumentais. Verificar, a cada uso, se os instrumentais não sofreram algum dano.

Utilizar sempre os instrumentais apropriados para cada tipo de implante, nunca tentar substituir algum elemento por outro que não apropriado ao uso pretendido.

Os instrumentais não devem ser armazenados juntamente com produtos químicos, que podem exalar vapores corrosivos trazendo eventuais danos aos mesmos.

CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS

Não se aplicam.

DADOS DO FABRICANTE

Traumec Tecnologia e Implantes Ortopédicos Importação e Exportação Ltda

CNPJ 09.123.223/0001-10

Rua 1CA, nº 202 – Cidade Azul II – Rio Claro – CEP 13505-820 - Brasil

Fone: (19) 3522-1177 - www.traumec.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Fone: (19) 9 9600-1557 | e-mail: sac@traumec.com.br

Responsável Técnico

Wladimir Alex Magalhães Barcha

CREA/SP 5060625434

